

Istruzioni d'uso

AlproJet MixCup



Informazioni rispetto al flusso di lavoro concemente la preparazione e le Procedure Operative Standard (POS) possono essere ottenute sul nostro sito: www.alpro-medical.de, oppure richieste via e-mail: info@alpro-medical.de, oppure per telefono: +49 7725 9392-0



Contenuto

1. Avviso per l'utente	4
2. Simboli utilizzati sulle informazioni di prodotto, etichettatura e istruzioni d'uso	4
3. Gruppo destinatario	4
4. Destinazione d'uso – utilizzo previsto	5
5. Applicazione	5
6. Manutenzione	6
7. Dati per l'ordinazione	6
8. Istruzioni per lo smaltimento	7
9. Segnalazioni di incidenti	7

1. Avviso per l'utente

Seguire le seguenti istruzioni per un utilizzo sicuro, economico e senza disturbi.

2. Simboli utilizzati sulle informazioni di prodotto, etichettatura e istruzioni d'uso

	seguire le istruzioni d'uso
	attenzione, informazioni sulla sicurezza
	numero di articolo
	dispositivo medico
	numero identificativo del prodotto
	numero di serie
	codice a barre industria della salute
	simbolo CE per un dispositivo medico di classe I
	rappresentante autorizzato nel Regno Unito
	rappresentante autorizzato in Svizzera
	data di produzione
	fabbricante, azienda ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen
	logo dell'azienda ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen

3. Gruppo destinatario

Queste istruzioni sono rivolte per tutti gli utilizzatori (medici, dentisti e professionisti titolati all'utilizzo di dispositivi medici come i professionisti dell'igiene dentale) nelle cliniche odontoiatriche e medicali.

4. Destinazione d'uso – utilizzo previsto con la serie AlproJet

AlproJet MixCup : Per la preparazione di soluzioni pronte all'uso AlproJet per la manutenzione e la pulizia degli impianti dentistici d'aspirazione.

AlproJet-D: Liquido concentrato per la disinfezione quotidiana e la pulizia simultanea degli impianti dentistici d'aspirazione, con e senza separatore d'amalgama.

AlproJet-DD: Liquido concentrato con effetto disinfezione estesa per la pulizia e la cura quotidiana degli impianti dentistici d'aspirazione, con e senza separatore d'amalgama.

AlproJet-W: Liquido concentrato per la contro-pulizia acida e la manutenzione settimanale degli impianti dentistici d'aspirazione, con e senza separatore d'amalgama.

5. Applicazione





L'AlproJet MixCup può essere utilizzato solo con la serie AlproJet

AlproJet-D: 5 % di concentrazione di applicazione

AlproJet-DD: 2 % di concentrazione di applicazione

AlproJet-W: 5 % di concentrazione di applicazione

Per un'applicazione sono necessari 2 litri di soluzione pronta all'uso. A tal fine, dosare 2 x **AlproJet** concentrato attraverso la camera di dosaggio del flacone dosatore (Fig. 1) e riempire l'**AlproJet MixCup** (Fig. 2) con acqua potabile (temperatura ambiente) per ottenere 2 litri di soluzione pronta all'uso (Fig. 3). Aspirare quindi 1 litro di soluzione pronta all'uso attraverso i tubi di aspirazione (Fig. 4) e versare il restante litro nella sputacchiera (Fig. 5). Lasciare agire per almeno 60 minuti e sciacquare accuratamente con acqua i tubi di aspirazione e la sputacchiera prima di iniziare il lavoro.

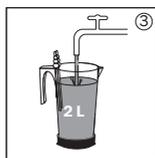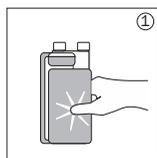

Per l'applicazione di AlproJet MixCup con AlproJet-D, AlproJet-DD o AlproJet-W seguire le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.

L'uso è riservato a personale medico qualificato che indossi abbigliamento protettivo adeguato.

6. Manutenzione

Lo sporco visibile può essere rimosso con AlproJet-D o AlproJet-DD e una spazzolina di plastica.

7. Dati per l'ordinazione

AlproJet-D

REF 3104	1 L flacone dosatore
REF 3100	10 L tanica
REF 3124	StarterSet



AlproJet-DD

REF 3120	1 L flacone dosatore
REF 3115	5 L tanica
REF 3125-N	StarterSet



AlproJet-W

REF 3106	1 L flacone dosatore
REF 3105	5 L tanica
REF 3108	10 L tanica



AlproJet MixCup

REF 3085	contenitore multifunzionale con adattatore doppio per la manutenzione e la pulizia del sistema di aspirazione
REF 3088	contenitore multifunzionale con adattatore triplo per la manutenzione e la pulizia del sistema di aspirazione
REF 3090	adattatore di connessione (doppio) per AlproJet MixCup
REF 3091	adattatore di connessione (triplo) per AlproJet MixCup



8. Istruzioni per lo smaltimento

AlproJet MixCup deve essere smaltito con lo sporco residuo, l'imballaggio può essere riciclato.

9. Segnalazioni di incidenti

Riportare ogni incidente grave che può essere relazionato al prodotto a:

ALPRO MEDICAL GMBH

E-Mail: quality@alpro-medical.de

Tel.: **+49 7725 9392-0**

e le autorità nazionali



Informazioni relativi al processo di trattamento nonché tutte le procedure operative standard, schede dati di sicurezza, istruzioni per l'uso, ecc. sono disponibili sul nostro sito web **www.alpro-medical.de**

Per qualsiasi domanda invitiamo a contattarci su **www.alpro-medical.de** o telefonicamente al numero **+49 7725 9392-0**.

È possibile inoltre contattare nostri agenti telefonicamente o via mail.