

Individuelle Arbeitsanweisung

Reinigung und Desinfektion aller abwaschbaren, kontaminierten Flächen

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Reinigen und Desinfizieren des 2-Kammereimers	Vor dem erneuten Ansetzen der Reinigungs- und Desinfektionslösung	Schutzhandschuhe und Schutzbrille <ul style="list-style-type: none"> ➤ Eimer entleeren ➤ Eimer mit Trinkwasser ausspülen ➤ ggf. mit geeigneter Bürste reinigen ➤ mit Desinfektionstuch 2 – Kammereimer vollständig auswischen. <p>Hinweis: vorher hygienische Händedesinfektion!</p>	Kunststoffbürste <ul style="list-style-type: none"> • MinutenWipes, ALRPO MEDICAL GMBH • MaxiWipes reel*, ALRPO MEDICAL GMBH mit <ul style="list-style-type: none"> - MinutenSpray-classic, ALPRO MEDICAL GMBH getränkt • BCSan 100, ALPRO MEDICAL GMBH
Reinigungs- und Desinfektionslösung im 2-Kammereimer ansetzen	Arbeitstäglich neu ansetzen Wechseln bei sichtbarer Verschmutzung (z. B. Trübung, Ausflockung, Bildung von Schlieren)	Schutzhandschuhe und Schutzbrille <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1. Kammer: nur Trinkwasser einfüllen ➤ 2. Kammer: <ul style="list-style-type: none"> • erst warmes Trinkwasser • dann Konzentrat • und dann warmes Trinkwasser auffüllen. 	Geeigneter Eimer Reinigungs- und Desinfektionslösung <ol style="list-style-type: none"> 1. Handwarmes Trinkwasser 2. DesNet+*, ALPRO MEDICAL GMBH 1 - 5 % je nach Einsatzgebiet *siehe wichtiger Hinweis Seite 2
* Ansetzen der trockenen Tücher mit 2,5 L MinutenSpray-classic oder bei MaxiWipes reel 1,4 L und bei MaxiWipes-L reel 1,6L PlastiSept eco , ALPRO MEDICAL GMBH			

WAS	WANN	WIE	WOMIT
<p>Reinigung und Desinfektion aller kontaminierten Flächen in der Praxis</p> <p>Behandlungszimmer, Aufbereitungsraum, Labor etc.</p> <p>Fußböden in invasiven Bereichen (OP etc.)</p>	<p>Nach Behandlungsende arbeitstäglich und bei sichtbarer Kontamination</p>	<p>Schutzhandschuhe und Schutzbrille</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ MaxiWipes reel-Tuch mit Lösung aus der 2. Kammer tränken und die Flächen reinigen und desinfizieren ➤ MaxiWipes reel-Tuch immer erst in der 1. Kammer auswringen bevor die Anwendung erneut durchgeführt wird ➤ Flächen gleichmäßig benetzen und gemäß Angaben (s. u.) einwirken lassen ➤ Entsorgung des MaxiWipes reel-Tuches 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-Kammereimer • MaxiWipes reel* ALPRO MEDICAL GMBH-Tuch • Trinkwasser • DesNet+*, ALPRO MEDICAL GMBH siehe wichtiger Hinweis
<p>* Ansetzen der trockenen Tücher mit 2,5 L MinutenSpray-classic oder bei MaxiWipes reel 1,4 L und bei MaxiWipes-L reel 1,6L PlastiSept eco, ALPRO MEDICAL GMBH</p>			

***Wichtiger Hinweis:**

Für allgemeine Hygiene bei 1,0% Verdünnung:
5 Liter Konzentrat ergeben 500 Liter gebrauchsfertige Lösung
1,0 % - 60 Min.
2,0 % - 15 Min.

Bei hoher Infektionsgefahr max. Wirksamkeit:

4% - 60 Min. oder
5% - 15 Min. (z. B. kritische Bereiche wie OP-Säle)
ggf. bei hartnäckiger Verschmutzung, z.B. vom Sitzpolster, kann eine Kunststoffbürste hilfreich sein

Unterweisung durch:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Personal)

Erstellt von:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

aktualisiert am:

Datum/Unterschrift (Personal)