

WL-Serie

Unser Team für die validierbare, semimanuelle Aufbereitung dentaler Übertragungsinstrumente

WL-clean

Gebrauchsfertige Lösung zur nicht proteinfixierenden Reinigung (Innen- und Außenflächen) vor der Desinfektion/ Sterilisation von ärztlichen und zahnärztlichen Hohlkörperinstrumenten, wie Turbinen, Hand- und Winkelstücke, innengekühlte Instrumente und Endoskope.

WL-cid

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion (Innen- und Außenflächen) von medizinischen und dentalen Hohlkörperinstrumenten.

WL-dry

Gebrauchsfertiges Spray zur Trocknung nach der Reinigung und/oder Desinfektion der Innenflächen von medizinischen und dentalen Hohlkörperinstrumenten.

WL-Blow

Die Ausblasvorrichtung WL-Blow mit integriertem Luftmengenbegrenzer dient zum Ausblasen, Trocknen und zur Reinigungsunterstützung nach der Anwendung von WL-clean/ WL-cid (Reinigung/ Desinfektion) an Innenflächen von Hohlkörper- und Übertragungsinstrumenten.



Adapter gehören nicht zum Lieferumfang

Übertragungsinstrumente nicht in Desinfektionsbäder/Lösungen einlegen und nicht im Ultraschall reinigen!

- Schutzmaßnahmen vor möglichen Infektionen treffen.
- 1** Schleifinstrumente (Bohrer) entfernen.
 - 2** Schleifinstrument (Bohrer) in eine geeignete Reinigungs-/Desinfektionslösung legen.
 - 3** Übertragungsinstrument 20 Sekunden mit Betriebswasser spülen.
 - 4** Turbine von der Schnellkupplung abziehen. Hand-/Winkelstück von der Schnellkupplung des Motors entfernen.
 - 5** Grobe Anschmutzungen vollständig mit einem nicht proteinfixierenden Desinfektionstuch (z.B. CleanWipes, MinutenWipes oder PlastiSept eco Wipes) entfernen.
 - 6** Kontaminationssicherer Transport an den Ort der Aufbereitung



Anwendung von WL-clean (1) und WL-cid (2)

Reinigung und Desinfektion

Reinigung (1), hygienische Vorbehandlung (1) und Desinfektion (2) aller Medienwege und Innenflächen von Hand- und Winkelstücken und Turbinen.

Bitte auf geeignete Adapter und aktuelle Verfahrensanweisung achten!




1



2



- 1 Außenflächen von Hand- und Winkelstücken oder Turbinen flächig mit dem nicht proteinfixierendem WL-clean/IC-100 einschäumen/behandeln und für mindestens 1 Minute einwirken lassen.
- 2 Unter fließendem Wasser für mindestens 10 Sekunden mit einer geeigneten Kunststoffbürste sichtbare Anschmutzungen (auch im Bereich der Spannzanze) entfernen.
- 3 Passenden ALPRO-Adapter Typ „G“ auf die WL-clean Dose aufstecken. Instrument mit der Antriebsseite auf den ALPRO-Adapter stecken.
- 4 Instrument unter fließendem Wasser (kein „scharfer Wasserstrahl“/Aerosolvermeidung) 3 x 2 Sekunden durchspülen (Lösung muss sichtbar austreten).
- 5 Instrument vom Adapter nehmen und ablegen. Das Reinigungsmittel WL-clean nun mindestens 1 Minute einwirken lassen. Anschließend außen mit trockenem Tuch (MaxiWipes reel) trocken reiben.
- 6 Passenden ALPRO-Adapter Typ „G“ auf die WL-cid-Dose aufstecken. Instrument mit der Antriebsseite auf den ALPRO-Adapter stecken.
- 7 Instrument mit WL-cid mind. 2 x 3 Sekunden zur Abschlussdesinfektion der Innenflächen durchsprühen (Lösung muss sichtbar austreten). Instrument vom Adapter nehmen und ablegen.
- 8 Zur Abschlussdesinfektion der Außenflächen des Instrumentes mit WL-cid besprühen bis die gesamte Oberfläche benetzt ist. Desinfektionsmittel 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit trockenem Tuch (MaxiWipes reel) abreiben, um chemische Rückstände zu entfernen.

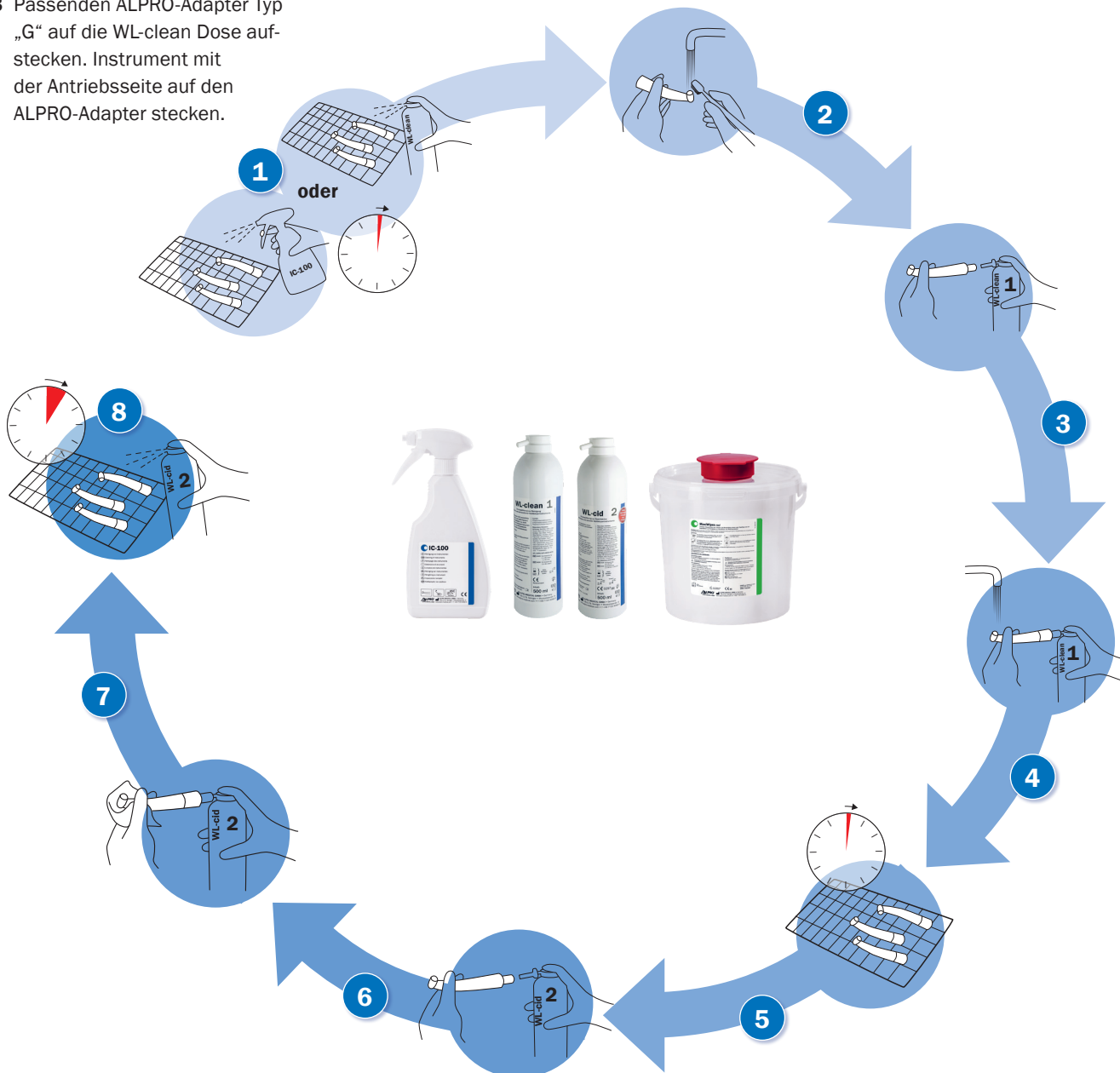

Anwendung von WL-dry/WL-Blow


Trocknung

3

WL-dry wird als Trocknungsspray ausschließlich mit spezifischen ALPRO-Adaptoren nach jeder Aufbereitung mit WL-clean (1) oder WL-cid (2) angewendet.



- 1** Passenden ALPRO-Adapter, Typ „G“, auf die WL-dry-Dose/ WL-Blow (Druckluftpistole) fest aufstecken. Instrument mit der Antriebsseite auf den ALPRO-Adapter, Typ „G“, stecken.
Instrument mind. 2 x 3 Sekunden ausblasen. Austretende Desinfektionsmittelrückstände mit einem trockenen Tuch (MaxiWipes reel) aufnehmen. Instrument vom Adapter nehmen und ablegen.
- 2** Visuelle Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit
- 3** Gemäß Herstellerangaben pflegen/ölen.
- 4** Gemäß Risikoeinstufung weiter verfahren (bei kritischen Übertragungsinstrumenten verpackte Sterilisation).

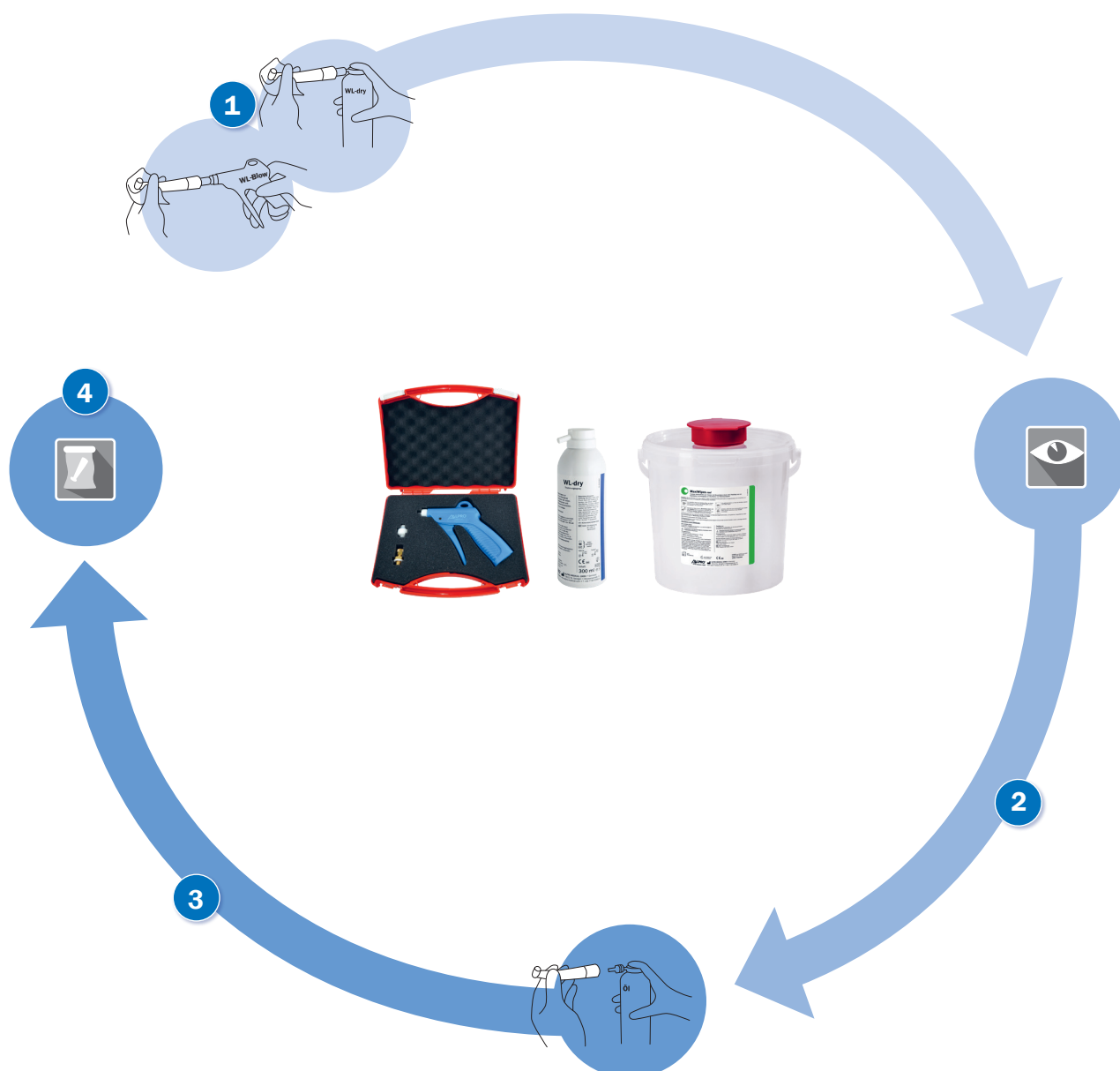


ALPRO-Adapter



REF 3547

WL-Adapter 02/G (Edelstahl)
[ISO-Schnittstelle](#)

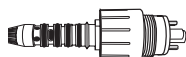

REF 3533

WL-Adapter 03/G (Edelstahl)
[Sirona-Schnittstelle](#)




REF 3534

WL-Adapter 04/G (Edelstahl)
[KaVo-Schnittstelle](#)



REF 3535

WL-Adapter 05/G (Edelstahl)
[Bien Air-Schnittstelle](#)

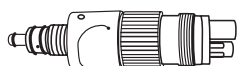


REF 3536

WL-Adapter 06/G (Edelstahl)
[W&H-Schnittstelle](#)



REF 3537

WL-Adapter 07/G (Kunststoff)
[T1 Classic Sirona-Schnittstelle](#)

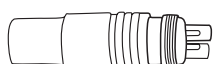

REF 3539

WL-Adapter 09/G (Edelstahl)
[NSK-Schnittstelle](#)



REF 3561

WL-Adapter 10/G (Edelstahl)
[Morita-Schnittstelle](#)



REF 3563

WL-Adapter 11/G (Edelstahl)
[ACETON-AIR N GO Airpolisher SUPRA/Perio-Düse](#)



REF 3564

WL-Adapter 12/MF (Edelstahl)
[KaVo MF-Handstück-Kanülen](#)



REF 3577

WL-Adapter 14/G (Edelstahl)
[Borden/Midwest 4-Loch Anschluss](#)

Hygienefortbildung

in Ihrer Praxis

Sie möchten gerne an einer Hygienefortbildung von ALPRO teilnehmen, aber es gibt keinen Termin in Ihrer Nähe?

Dann holen Sie sich die Fortbildung einfach in Ihre Praxis!


Der für Sie zuständige ALPRO-Medizinprodukteberater erläutert Ihnen alles rund um die aktuellen Richtlinien und Vorgaben der Behörden sowie Praxisbegehungen. Unser Mitarbeiter macht einen Praxischeck und Sie erarbeiten gemeinsam einen individuellen Hygieneplan. Nach der Fortbildung erhalten Sie einen Hygiene-Ordner inklusive eines USB-Sticks mit allen relevanten Unterlagen wie beispielsweise Sicherheitsdatenblätter oder standardisierte Arbeitsanweisungen. Zudem stellen wir dem Praxisteam ein Zertifikat nach den Vorgaben der Leitlinie der BZÄK (Pkt.) aus.

Dauer: 4 Stunden
Kosten: Material für 550,- Euro*
Zusatzoption: jährliches Hygieneupdate**
gem. MPG (2 Stunden)
Kosten: Material für 250,- Euro*

Sie würden gerne einen Termin vereinbaren oder an einer unserer Fortbildungen teilnehmen?

Melden Sie sich bei Ihrem zuständigen Medizinprodukteberater, den Sie unter www.alpro-medical.de finden oder senden Sie eine Nachricht an info@alpro-medical.de unter Angabe Ihrer Adresse und Telefonnummer. Wir melden uns dann gerne umgehend bei Ihnen.

Ihr ALPRO-Team

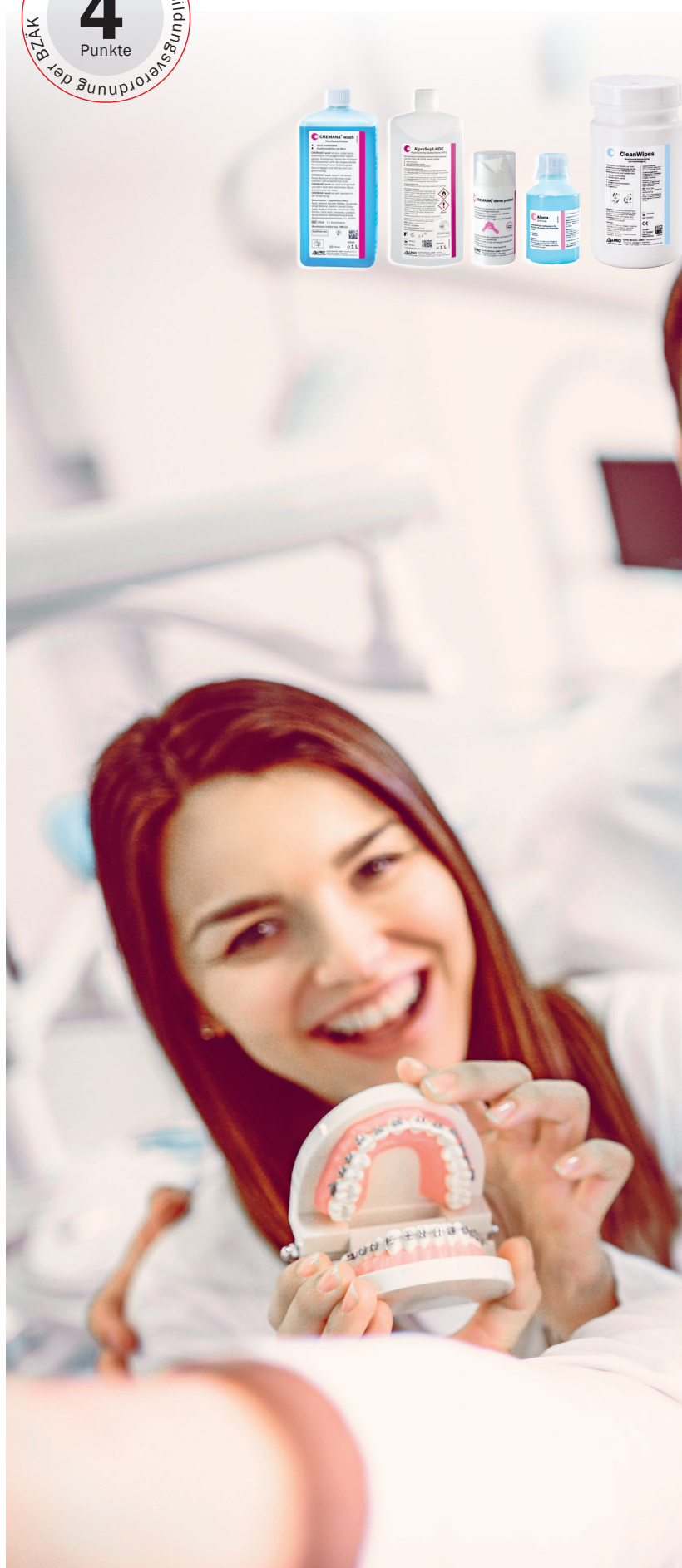

* Die genannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich pro Fortbildung und zzgl. MwSt.

** Hierfür werden 2 Fortbildungspunkte vergeben

Unsere Lösungen für Ihre gesamte Praxishygiene



Unsere zertifizierten und umweltfreundlichen Produkte decken den gesamten Bereich der Infektionsprävention in der Praxis ab; von der Händedesinfektion über die Oberflächen- und Instrumentendesinfektion bis hin zur Beseitigung von Biofilm und dessen Prävention in Betriebswasserwegen zahnärztlicher Behandlungseinheiten. Bei der Reinigung, Desinfektion und Pflege zahnärztlicher Absauganlagen gehört ALPRO zu den weltweit führenden Herstellern. Lernen Sie unser umfangreiches Sortiment und unsere Serviceleistungen kennen unter: www.alpro-medical.de



ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9
78112 St. Georgen
Deutschland

Tel. +49 7725 9392-0
Fax +49 7725 9392-91
www.alpro-medical.de
info@alpro-medical.de