

ALPRO Wipes

Unsere Wipes mit und ohne Alkohol für alle Bereiche der Zahnarztpraxis:
CleanWipes, MinutenWipes, PlastiSept eco Wipes und MaxiWipes reel

CleanWipes

Alkoholfreie Feuchttücher zur nicht proteinfixierenden Reinigung und Dekontamination von Oberflächen von Medizinprodukten und intakter Haut.

PlastiSept eco Wipes

Alkoholfreie Feuchttücher zur Reinigung und Desinfektion von empfindlichen Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. ärztliche und zahnärztliche Behandlungseinheiten (inkl. Sitzpolster und Schwebetische) und Röntgengeräte insbesondere mit Plexiglas- oder Metalloberflächen.

MinutenWipes

Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Reinigung und Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten wie z. B. Turbinen, Hand- und Winkelstücke, Unitgriffe, Schwebetische und medizinische Geräte.

MaxiWipes reel

Trockene Vliesstoffrolle zum Tränken mit MinutenSpray-classic oder PlastiSept eco zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen von Medizinprodukten.






- nicht proteinfixierend
- aldehyd- und phenolfrei
- hochwertige Tuchqualität
(„Cotton touch“, 50 g/m²)
- angenehm neutraler Geruch
- ohne Oxidantien
- dermatologisch geprüft

CleanWipes sind gebrauchsfertige Reinigungstücher, speziell entwickelt zur Reinigung und Dekontamination von Medizinprodukten, Händen und intakter Haut. Organische und anorganische Rückstände werden entfernt.


Dekontamination:



der Hände

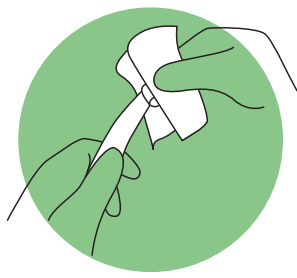

vor der Aufbereitung

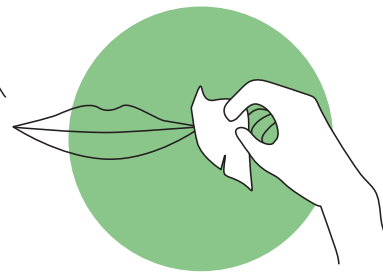

nach Abdruckabnahme



Anwendung von PlastiSept eco Wipes



- aldehyd- und phenolfrei
- frei von Alkohol und QAV
- VAH zertifiziert – Flächen-
desinfektion mit Mechanik
- gebrauchsfertig
- fusselfrei

PlastiSept eco Wipes sind besonders materialverträgliche Wischdesinfektionstücher zur Anwendung auf Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie speziell für sensible Oberflächen, wie alkoholempfindliche Oberflächen, Plexiglasoberflächen und für Anwender, die empfindlich auf alkoholische Schnelldesinfektionsmittel reagieren.

vor der Aufbereitung

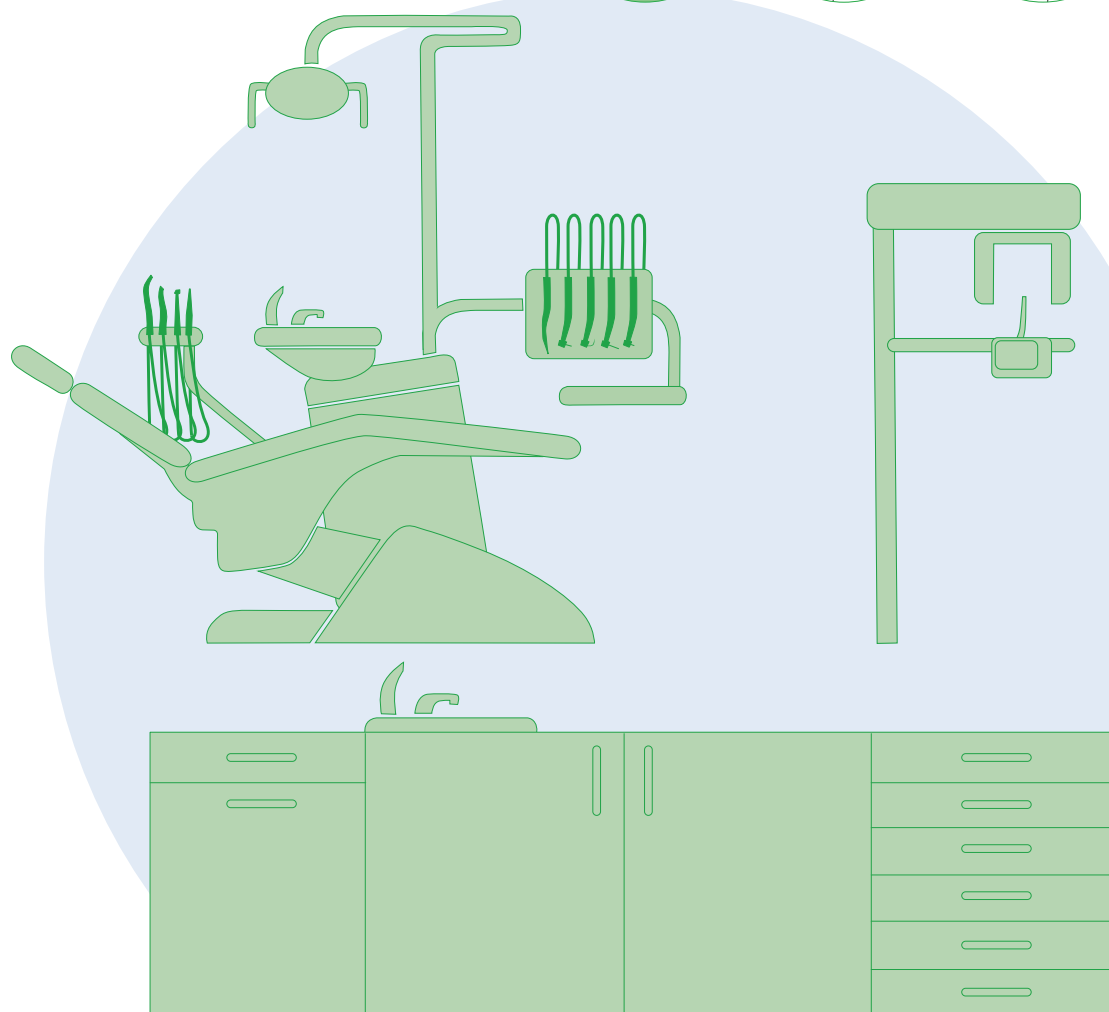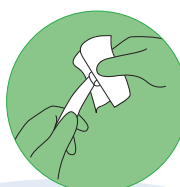

Anwendung von MinutenWipes


Anwendung nur auf alkoholverträglichen Oberflächen!



- aldehyd- und phenolfrei
- VAH zertifiziert – Flächen-
desinfektion mit Mechanik
(unter geringer Belastung)
- sehr schnelle Wirkung
- gebrauchsfertig
- fusselfrei

MinutenWipes dienen zur schnellen Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten, Schwebetischen, Unitgriffen, medizinischen Geräten, Bedienungstasten, Hand- und Winkelstücken, Turbinen etc.

Einwirkzeit beachten!
Instrumente und Oberflächen während der Einwirkzeit feucht halten!

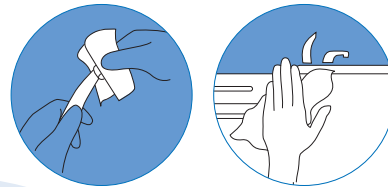


Anwendung von MaxiWipes reel/L-reel

Achtung: Es ist unbedingt darauf zu achten, dass bei Verwendung von selbst zu tränkenden Einwegtüchern eine Kompatibilität mit der verwendeten Desinfektionslösung gegeben ist!



- besonders hochwertige und reißfeste Vliestücher „Cotton Touch“ Qualität (50 g/m²)
 - extra große Tücher (MaxiWipes reel: 17 x 26 cm, MaxiWipes-L reel: 20 x 40 cm), ideal für große Flächen
 - einsetzbar mit MinutenSpray-classic oder PlastiSept eco
- 1** Lösung und Tücher nach Ablauf des Verfalldatums (1 Monat nach Tränken mit Wirkstofflösung) entsorgen.
 - 2** Innenseite der Spenderbox und des Deckels mit einem mit BC-San 100 getränkten Tuch gründlich auswischen.
 - 3** Spenderbox und Deckel trocknen lassen.
 - 4** reel/L-reel Beutel in die Spenderbox hineinstellen und an der Trennlinie aufschneiden.
 - 5** Die eingesetzte Tränklösung (MinutenSpray-classic/PlastiSept eco), LOT-Nummer und das Ansetzdatum in das beigegefügte Etikett übertragen und sichtbar auf dem Deckel der Spenderbox aufbringen.
 - 6** Den geöffneten Beutel zum Rand des Behälters maximal nach außen stülpen. Vorgezupftes, innerstes Tuch ein kleines Stück aus der Mitte herausziehen.
 - 7** Die gebrauchsfertige Lösung (MinutenSpray-classic oder PlastiSept eco) langsam spiralförmig von der Mitte nach außen über die Vliesstoffrolle gießen.
 - 8** Das innerste Tuch der Rolle in die sternförmige Entnahmeöffnung des Deckels einziehen und werfen. Den Deckel auf den Spender aufsetzen und verschließen, bis er einrastet.
 - 9** Die Tücher sind nach 30 Minuten durchtränkt.

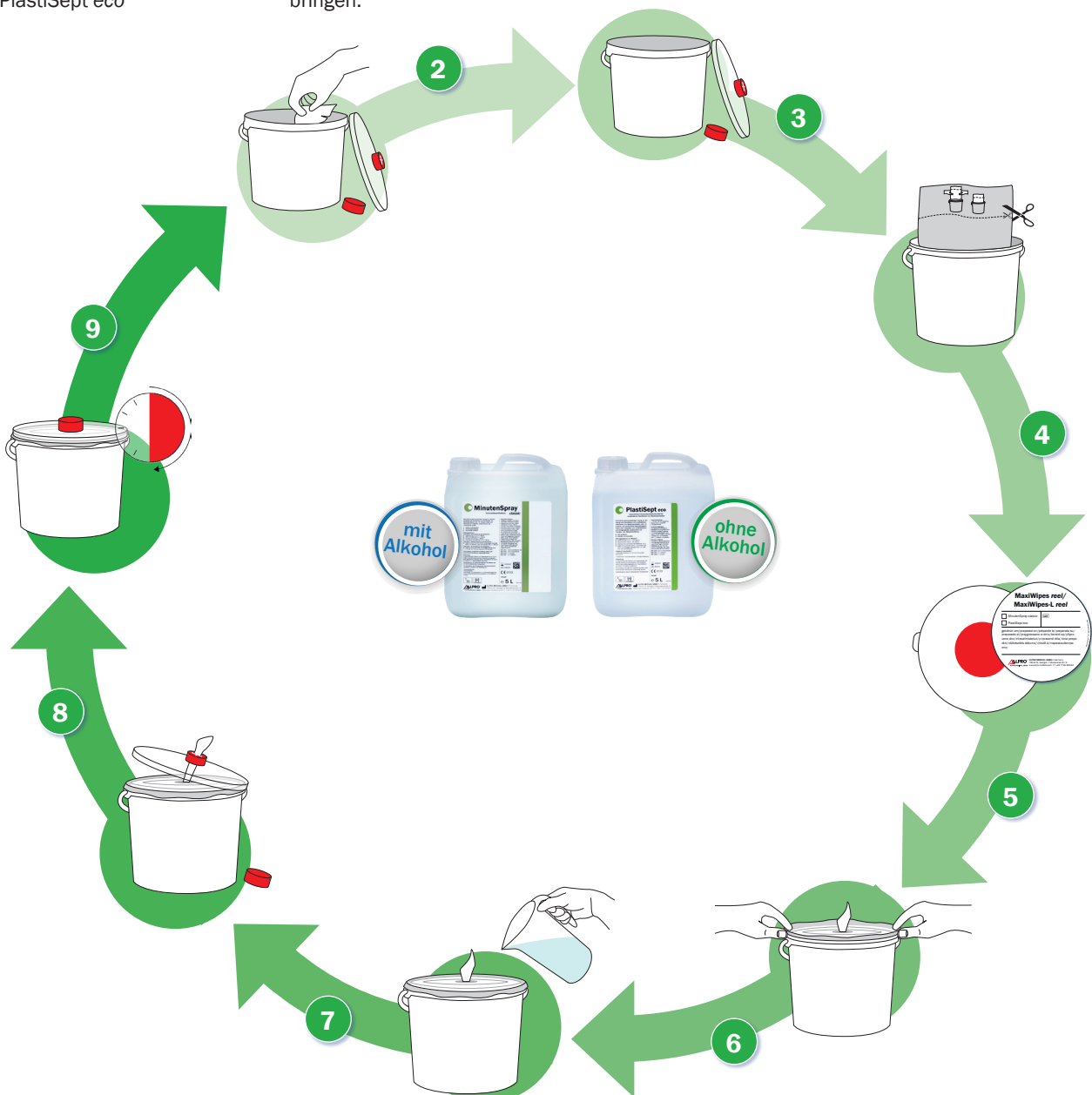

Hygienefortbildung

in Ihrer Praxis

Sie möchten gerne an einer Hygienefortbildung von ALPRO teilnehmen, aber es gibt keinen Termin in Ihrer Nähe?

Dann holen Sie sich die Fortbildung einfach in Ihre Praxis!


Der für Sie zuständige ALPRO-Medizinprodukteberater erläutert Ihnen alles rund um die aktuellen Richtlinien und Vorgaben der Behörden sowie Praxisbegehungen. Unser Mitarbeiter macht einen Praxischeck und Sie erarbeiten gemeinsam einen individuellen Hygieneplan. Nach der Fortbildung erhalten Sie einen Hygiene-Ordner inklusive eines USB-Sticks mit allen relevanten Unterlagen wie beispielsweise Sicherheitsdatenblätter oder standardisierte Arbeitsanweisungen. Zudem stellen wir dem Praxisteam ein Zertifikat nach den Vorgaben der Leitlinie der BZÄK (Pkt.) aus.

Dauer: 4 Stunden
Kosten: Material für 550,- Euro*
Zusatzoption: jährliches Hygieneupdate**
gem. MPG (2 Stunden)
Kosten: Material für 250,- Euro*

Sie würden gerne einen Termin vereinbaren oder an einer unserer Fortbildungen teilnehmen?

Melden Sie sich bei Ihrem zuständigen Medizinprodukteberater, den Sie unter www.alpro-medical.de finden oder senden Sie eine Nachricht an info@alpro-medical.de unter Angabe Ihrer Adresse und Telefonnummer. Wir melden uns dann gerne umgehend bei Ihnen.

Ihr ALPRO-Team

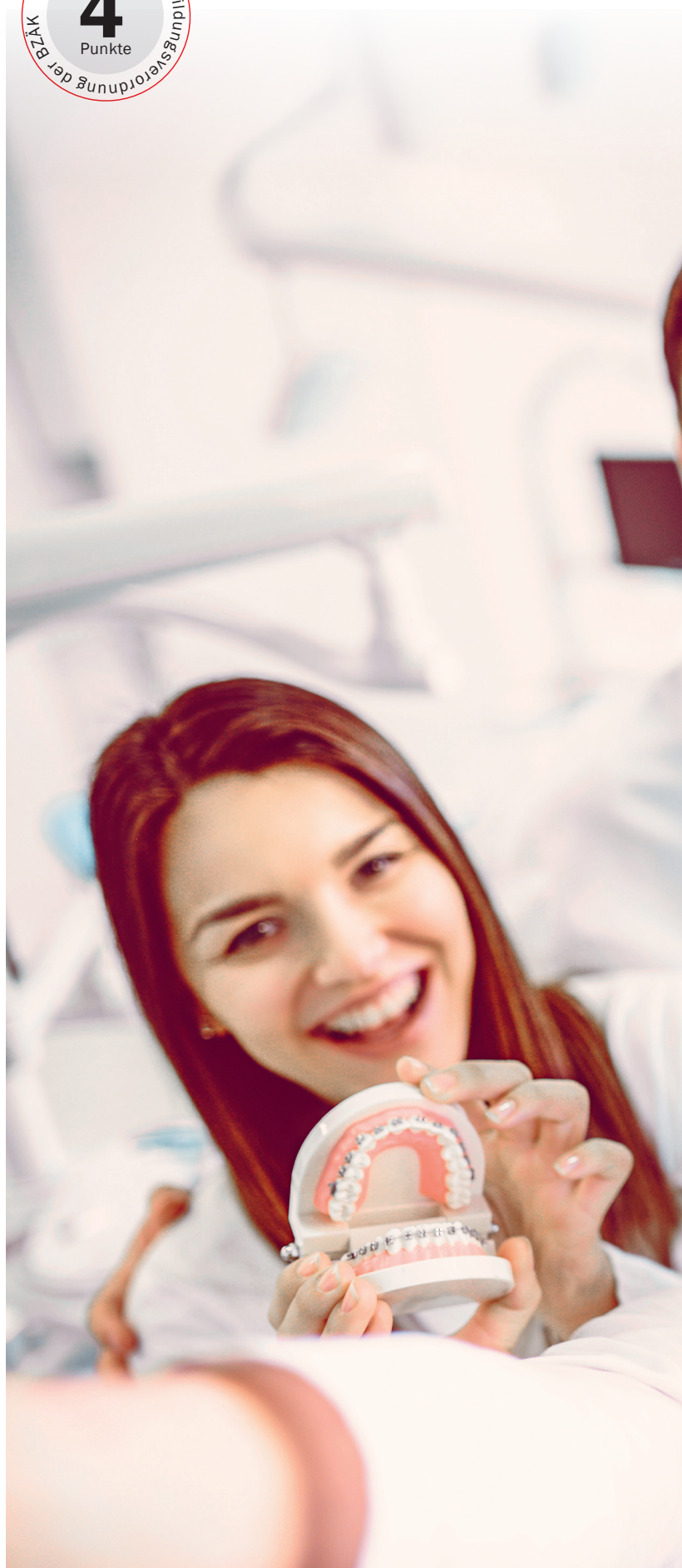

* Die genannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich pro Fortbildung und zzgl. MwSt.

** Hierfür werden 2 Fortbildungspunkte vergeben

Unsere Lösungen für Ihre gesamte Praxishygiene



Unsere zertifizierten und umweltfreundlichen Produkte decken den gesamten Bereich der Infektionsprävention in der Praxis ab; von der Händedesinfektion über die Oberflächen- und Instrumentendesinfektion bis hin zur Beseitigung von Biofilm und dessen Prävention in Betriebswasserwegen zahnärztlicher Behandlungseinheiten. Bei der Reinigung, Desinfektion und Pflege zahnärztlicher Absauganlagen gehört ALPRO zu den weltweit führenden Herstellern. Lernen Sie unser umfangreiches Sortiment und unsere Serviceleistungen kennen unter: **www.alpro-medical.de**





ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9
78112 St. Georgen
Deutschland

Tel. +49 7725 9392-0
Fax +49 7725 9392-91
www.alpro-medical.de
info@alpro-medical.de