



Individuelle Arbeitsanweisung

Reinigung und Desinfektion von Absauganlagen für spezielle Anwendungen (Pulverstrahlanwendungen + Chirurgie, CHX, H₂O₂, NaOCl)

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Arbeitsplatz/ Behandlungseinheit	Reinigung der Saugschläuche und des Speischalenweges	➤ Vor und nach der Anwendung mit Calcium/Natriumbicarbonat (z.B. Pulverstrahlanwendungen) - oder ➤ chirurgischen Eingriffen von Montag - Donnerstag ➤ Zur Kontrareinigung am Freitag	Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen! (PSA) ➤ Die Reinigungs- und Desinfektionslösung wird für 2 Liter Gebrauchslösung in einer Konzentration von 5% oder 10 % AlproJet-W 100 ml oder 200 ml angesetzt ➤ erst warmes Trinkwasser (40-50 °C), ➤ dann Konzentrat s. o. ➤ und dann warmes Trinkwasser (40-50 °C) bis zu 2 Liter auffüllen. ➤ Die Reinigungs- und Desinfektionslösung wird für 2 Liter Gebrauchslösung in einer Konzentration von 2 % (AlproJet-DD = 40 ml) oder 5% (AlproJet-D oder -W = 100 ml) angesetzt: ➤ erst warmes Trinkwasser (40-50 °C), ➤ dann Konzentrat s. o. ➤ und dann warmes Trinkwasser (40-50 °C) bis zu 2 Liter auffüllen. ➤ 2 Liter gebrauchsfertige Lösung davon 1 Liter durch die Saugschläuche und 1 Liter schluckweise in die Speischale	• PSA (persönliche Schutzausrüstung) • AlproJet MixCup, ALPRO MEDICAL GMBH <u>Montag – Donnerstag</u> • AlproJet-W, ALPRO MEDICAL GMBH (5-10%) <u>Freitag</u> • AlproJet-DD, ALPRO MEDICAL GMBH (2%) VAH zertifiziert oder • AlproJet-D, ALPRO MEDICAL GMBH (5%) VAH zertifiziert

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Arbeitsplatz/ Behandlungseinheit	Reinigung und Desinfektion der Speischale	Nach jeder Behandlung	Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen! (PSA) ➤ Flächendesinfektionsmittel ➤ Speischalenreiniger ➤ Geeignete Reinigungsbürste	• PSA (persönliche Schutzausrüstung) • MinutenWipes, ALRPO MEDICAL GMBH • PlastiSept eco Wipes, ALRPO MEDICAL GMBH • AlproVir-Wipes, ALPRO MEDICAL GmbH • MaxiWipes <i>reel</i>*, ALRPO MEDICAL GMBH • AlproCleaner, ALPRO MEDICAL GMBH
	* MaxiWipes <i>reel</i> : Trockene Tücher getränkt mit MinutenSpray-classic -Lösung, ALPRO MEDICAL GMBH (2,4 L bei MaxiWipes <i>reel</i> / 2,8L bei MaxiWipes-L <i>reel</i>) oder PlastiSept eco -Lösung, ALPRO MEDICAL GMBH (1,8 L bei MaxiWipes <i>reel</i> / 2,1 L bei MaxiWipes-L <i>reel</i>).			

Unterweisung durch:

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

Datum/Unterschrift (Personal)

Erstellt von:

aktualisiert am:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

Datum/Unterschrift (Personal)