

Individuelle Arbeitsanweisung



Reinigung und Desinfektion von Absauganlagen

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Arbeitsplatz/ Behandlungseinheit	Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vor Behandlungsbeginn und ggf. zwischen den Behandlungen ➤ Nach blutigen Behandlungen 	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen! (PSA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Durchsaugen eines Luft-Wassergemisches 	<ul style="list-style-type: none"> • PSA (persönliche Schutzausrüstung) • AlproJet MixCup, ALPRO MEDICAL GMBH • Kaltes Trinkwasser (mind. 1 Liter)
	Reinigungs- und Desinfektionslösung ansetzen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mittags/abends nach Behandlungsende ➤ Nach Behandlung von Risikopatienten 	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen! (PSA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Reinigungs- und Desinfektionslösung wird für 2 Liter Gebrauchslösung in einer Konzentration von 2 % (AlproJet-DD = 40 ml) oder 5% (AlproJet-D oder -W =100 ml) angesetzt: <ul style="list-style-type: none"> ➤ erst warmes Trinkwasser (40-50 °C) ➤ dann Konzentrat s. o. ➤ und dann warmes Trinkwasser (40-50 °C) bis zu 2 Liter auffüllen. 	<ul style="list-style-type: none"> • PSA (persönliche Schutzausrüstung) • AlproJet MixCup, ALPRO MEDICAL GMBH <p><u>Montag – Dienstag*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • AlproJet-W, ALPRO MEDICAL GMBH (5%) <p><u>Mittwoch – Freitag*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • AlproJet-DD, ALPRO MEDICAL GMBH (2%) VAH zertifiziert <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • AlproJet-D, ALPRO MEDICAL GMBH (5%) VAH zertifiziert
<p>* <u>Hinweis:</u> Bei zentralen Arbeitssystemen AlproJet-DD (oder AlproJet-D) und AlproJet-W wochenweise wechseln. Spezialanwendung: PZR, Chirurgie, H²O², CHX und NaOCL siehe IAA AlproJet Spezialanwendung.</p>				

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Arbeitsplatz/ Behandlungseinheit	Reinigung und Desinfektion der Saugschläuche von innen und der Speischale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2-mal täglich; ➤ Mittags/abends nach Behandlungsende ➤ Nach Behandlung von Risikopatienten 	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen! (PSA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 L gebrauchsfertige Lösung, davon 1 L durch die Saugschläuche und ➤ 1 L schluckweise in die Speischale <p>Hinweis: Nicht gleich mit Trinkwasser nachspülen, Lösung bleibt über Nacht/Wochenende im System.</p> <p>Hinweis: Einwirkzeit mindestens 30 min.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PSA (persönliche Schutzausrüstung) • AlproJet MixCup, ALPRO MEDICAL GMBH • AlproJet-DD, ALPRO MEDICAL GMBH (2%) VAH zertifiziert <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • AlproJet-D, ALPRO MEDICAL GMBH (5%) VAH zertifiziert • AlproJet-W, ALPRO MEDICAL GMBH (5%)
	Reinigung und Desinfektion der Saugschläuche außen und der Speischale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nach jedem Patienten ➤ Vor Behandlungsbeginn ➤ Nach blutigen Behandlungen 	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen! (PSA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Abwischen mit einem geeignetem Desinfektionstuch <ul style="list-style-type: none"> ➤ Speischalenreiniger ➤ Geeignete Reinigungsbürste 	<ul style="list-style-type: none"> • PSA (persönliche Schutzausrüstung) • MinutenWipes, ALRPO MEDICAL GMBH • PlastiSept eco Wipes, ALRPO MEDICAL GMBH • AlproVir-Wipes, ALPRO MEDICAL GmbH • MaxiWipes reel*, ALRPO MEDICAL GMBH • AlproCleaner, ALPRO MEDICAL GMBH
<p>* MaxiWipes reel: Trockene Tücher getränkt mit MinutenSpray-classic-Lösung, ALPRO MEDICAL GMBH (2,4 L bei MaxiWipes reel/ 2,8L bei MaxiWipes-L reel) oder PlastiSept eco-Lösung, ALPRO MEDICAL GMBH (1,8 L bei MaxiWipes reel/ 2,1 L bei MaxiWipes-L reel).</p>				

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Arbeitsplatz/ Behandlungseinheit	Reinigung und Desinfektion der Saugkanülen-handstücke	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nach jedem Patienten ➤ Mittags/abends nach Behandlungsende ➤ sowie bei erhöhter Belastung, mindestens wöchentlich 	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen! (PSA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Außen abwischen mit einem geeigneten Desinfektionstuch (MinutenWipes) ➤ Zerlegen und blasenfreies Einlegen in geeignete Reinigungslösung (AlproZyme) und Desinfektionslösung (BIB forte eco) 	<ul style="list-style-type: none"> • PSA (persönliche Schutzausrüstung) • MinutenWipes, ALRPO MEDICAL GMBH • MaxiWipes reel*, ALRPO MEDICAL GMBH • AlproZyme**, ALPRO MEDICAL GMBH und • BIB forte eco***, ALPRO MEDICAL GMBH
	<p>* MaxiWipes reel: Trockene Tücher getränkt mit MinutenSpray-classic-Lösung, ALPRO MEDICAL GMBH (2,4 L bei MaxiWipes reel/ 2,8L bei MaxiWipes-L reel).</p> <p>** Anwendung siehe Gebrauchsanweisung AlproZyme.</p> <p>*** Anwendung siehe Etikett BIB forte eco.</p>			

Unterweisung durch:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Personal)

Erstellt von:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

aktualisiert am:

Datum/Unterschrift (Personal)