

Individuelle Arbeitsanweisung

Manuelle Reinigung und Desinfektion von Übertragungsinstrumenten (ÜI)



Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Arbeitsplatz/ Zahnarztstuhl	Durchspülen der genutzten Übertragungsinstrument	Nach Behandlungs-ende	Schutzhandschuhe + Mund-Nase-Schutz + Schutzbrille tragen! (PSA) ➤ ÜI mit Schleifinstrumenten am Instrumentenschlauch ➤ In die Speischale ➤ Mind. 20 Sekunden durchspülen	• PSA (persönliche Schutzausrüstung) • Betriebswasser aus der Behandlungseinheit • Timer
	Grobe Verschmutzung vollständig vom Übertragungsinstrument entfernen	Nach 20 Sekunden spülen	➤ Abwischen mit einem geeigneten vorgetränkten, nicht proteinfixierenden Reinigungstuch ➤ Schleifinstrument entfernen ➤ Schleifinstrumente (Bohrer) aus der Spannzange entfernen, dazu eignet sich eine Pinzette, die vor Verletzungen schützt.	• PlastiSept eco Wipes, ALPRO MEDICAL GMBH • MinutenWipes, ALPRO MEDICAL GMBH • Greifpinzette
	Kontaminationsgeschützter Transport vom Behandlungsplatz zum Aufbereitungsbereich (unrein)	Nach der Außen-Vorreinigung!		• Behälter mit Deckel z.B. geschlossenes Tray oder geeignete Desinfektionswanne mit Deckel

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum/ Unreine Seite	Hygienische Händedesinfektion	Nach Transport	➤ AlproSept-HDE-Spender gem. Herstellerangaben	AlproSept-HDE, ALPRO MEDICAL GMBH
	Vorbehandlung	Unmittelbar nach der Händedesinfektion	Schutzhandschuhe + Nassschürze + Schutzbrille tragen! (PSA) ➤ Mit IC-100 großzügig das ÜI in einem geeignetem Tray einschäumen ➤ 1 Minute - Einwirkzeit ➤ ÜI unter fließendem, kaltem Trinkwasser für mind. 10 Sekunden mit geeigneter Kunststoffbürste sichtbare Kontaminationen/Anschmutzungen entfernen	- PSA (persönliche Schutzausrüstung) - Greifpinzette - IC-100*, ALPRO MEDICAL GMBH - Wasser + geeignete, aufbereitbare Kunststoffbürste
	Außenreinigung	Nach der Vorbehandlung	Schutzhandschuhe + Nassschürze + Schutzbrille tragen! (PSA) ➤ ÜI mit geeigneten vorgetränkten, nicht proteinfixierenden Reinigungstüchern von außen abwischen ➤ Kontrolle	- PSA (persönliche Schutzausrüstung) Z. B. CleanWipes, PlastiSept eco Wipes, AlproVir-Wipes oder MaxiWipes reel, ALPRO MEDICAL GMBH - Ggf. Lupenbrille

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum/ unreine Seite	Innenreinigung	Nach der Außenreinigung	Schutzhandschuhe + Nassschürze + Schutzbrille tragen! (PSA) ➤ ÜI mit Reinigungslösung (WL-clean) mit Hilfe geeigneten Adapter für 3 x 2 Sekunden unter fließendem Trinkwasser durchspülen, ÜI auf ein saugfähiges, fusselfreies, nicht vorgetränktes Tuch, z. B. ALPRO MaxiWipes <i>reel</i> oder Tork-Tuch, Premium Spezial (gemäß VAH), ablegen ➤ 1 Minute - Einwirkzeit Hinweis: Lösung muss sichtbar ohne Rückstände austreten. Hinweis: Bei erstmaliger Anwendung Verlängerung der Einwirkzeit auf 10 Minuten, siehe Gebrauchsanweisung.	• PSA (persönliche Schutzausrüstung) • WL-clean*, ALPRO MEDICAL GMBH • Geeigneter ALPRO-Adapter • Trinkwasser • Timer Hinweis: Nicht auf Personen oder offene Flammen richten!
	Trocknung und Entfernung von Reinigungsmittelrückstände*	Nach der Innenreinigung	Schutzhandschuhe + Nassschürze + Schutzbrille tragen! (PSA) ➤ ÜI mit geeigneter Druckluft mit Hilfe eines geeigneten Adapters in ein saugfähiges, fusselfreies, nicht vorgetränktes Tuch durchblasen ➤ Trocknung bis keine sichtbaren Rückstände mehr austreten ➤ Dauer: mind. 2 x 3 Sekunden ➤ Kontrolle	• PSA (persönliche Schutzausrüstung) • WL-dry, ALPRO MEDICAL GMBH • WL-Blow, ALPRO MEDICAL GMBH • Geeigneter ALPRO-Adapter • MaxiWipes <i>reel</i> / -L <i>reel</i>, ALPRO MEDICAL GMBH • Timer Hinweis: Nicht auf Personen oder offene Flammen richten!
	*Achtung: bei der Anwendung Dose senkrecht halten			

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum/ unreine Seite	Innendesinfektion	Nach der Innenreinigung	Schutzhandschuhe + Nassschürze + Schutzbrille tragen! (PSA) ➤ ÜI mit Desinfektionslösung mit Hilfe geeigneten Adapter für 2 x 3 Sekunden in ein saugfähiges, fusselfreies, nicht vorgetränktes Tuch, z. B. ALPRO MaxiWipes <i>reel</i> oder Tork-Tuch, Premium Spezial (gemäß VAH), durchspülen/sprühen ➤ 5 Minuten - Einwirkzeit Hinweis: Lösung muss sichtbar ohne Rückstände austreten. Hinweis: Bei erstmaliger Anwendung Verlängerung der Einwirkzeit auf 10 Minuten, siehe Gebrauchsanweisung.	- PSA (persönliche Schutzausrüstung) - WL-cid* Lösung (viruzid), ALPRO MEDICAL GMBH - Geeigneter ALPRO-Adapter - MaxiWipes <i>reel</i> -L <i>reel</i>, ALPRO MEDICAL GMBH - Timer Hinweis: Nicht auf Personen oder offene Flammen richten!
	*Achtung: bei der Anwendung Dose senkrecht halten			
	Außendesinfektion	Nach der Innen-desinfektion	Schutzhandschuhe + Nassschürze + Schutzbrille tragen! (PSA) ➤ Gesamtes ÜI mit geeignetem vorgetränktem Desinfektionstuch von außen benetzen und abwischen** ➤ 5 Minuten - Einwirkzeit	- PSA (persönliche Schutzausrüstung) - MinutenWipes, ALPRO MEDICAL GMBH - Timer
			➤ Gesamtes ÜI mit WL-cid großzügig einsprühen und ÜI auf einem geeignetem Tray ablegen ➤ 5 Minuten - Einwirkzeit	- WL-cid Lösung (viruzid), ALPRO MEDICAL GMBH Z. B. ALPRO MaxiWipes <i>reel</i> oder Tork-Tuch, Premium Spezial (gemäß VAH) - Timer

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum/ unreine Seite	Trocknung und Entfernung von Desinfektionsmittelrückständen*	Nach der Außen-desinfektion	Schutzhandschuhe + Nassschürze + Schutzbrille tragen! (PSA) ➤ ÜI mit geeigneter Druckluft mit Hilfe eines geeigneten Adapters in ein saugfähiges, fusselfreies, nicht vorgetränktes Tuch, z. B. ALPRO MaxiWipes <i>reel</i> oder Tork-Tuch, (Premium Spezial gem. VAH) durchblasen ➤ Trocknung bis keine sichtbaren Rückstände mehr austreten ➤ Dauer: mind. 2x3 Sekunden	• PSA (persönliche Schutzausrüstung) • WL-dry, ALPRO MEDICAL GMBH • WL-Blow, ALPRO MEDICAL GMBH • Geeigneter ALPRO-Adapter • MaxiWipes <i>reel</i> -L <i>reel</i>, ALPRO MEDICAL GMBH • Timer Hinweis: Nicht auf Personen oder offene Flammen richten!
	Kontrolle	Nach der Außen-desinfektion	Schutzhandschuhe + Nassschürze + Schutzbrille tragen! (PSA) ➤ Sichtkontrolle	• PSA (persönliche Schutzausrüstung) • Ggf. Lupenbrille
	Pflege	Nach der Kontrolle	➤ Lt. Herstellerangabe Pflege	• Geeignete Pflegemittel und Pflege-Adapter Hinweis: Keine ALPRO-WL-Adapter
*Zur behördlich geforderten Leistungsüberprüfung von Reinigungsprozessen ist eine Restproteinbestimmung, bundeslandspezifisch oder durch ALPRO (ProCheck) zyklisch durchzuführen (DPA/BCA). **Hinweis: Die viruzide Außendesinfektion kann mit einem geeigneten mit WL-cid Lösung getränkten Tuch, z. B. AlproVir-Wipes, ALPRO MaxiWipes reel*** oder Tork-Tuch***, Premium Spezial (gemäß VAH) erfolgen. ***Hinweis: getränkt mit WL-cid Lösung.				

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum/ reine Seite	Einstufung (semi-kritisch & kritisch)	Nach der Pflege	Vor Tätigkeit auf der „Reinen Seite“ Schutzhandschuhe & Schutzkleidung wechseln ➤ Lt. Individueller Risikoeinstufung	Gem. Risikoeinstufung
	Freigabe	Nach der Risikoeinstufung	➤ Durch freigabeberechtigte Person	Chargen Kontrollbuch oder Netzeinbindung durch Dokumentations-Software
	Verwendung/Lagerung des ÜI	Nach der Klassifizierung	Geeignete Lagerung abhängig von der Klassifizierung	
	Verwendung des ÜI – Einstufung kritisch B			
	KRITISCH B Verpackung	Vor der Dampfsterilisation	➤ Lt. Herstellerangaben	- Geeignete Einschweißfolie - Geeignetes Einschweißgerät
	KRITISCH B Dampfsterilisation	Nach der Verpackung	➤ Beladung des Dampfsterilisators nach Herstellerangaben (Helixtest)	Geeigneter Dampfsterilisator (Klasse B)

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum/ reine Seite	KRITISCH B Kontrolle und Freigabe	Nach der Dampfsterilisation	➤ Kontrolle auf Feuchtigkeit, Unversehrtheit der Verpackung ➤ Kontrolle Helixtest ➤ Prozessparameter ➤ Thermoindikator	• Sichtkontrolle • Gerätekontrolle
	KRITISCH B Dokumentation	Nach der Kontrolle und Freigabe	➤ Dokumentation durch freigabeberechtigte Person	• Chargen Kontrollbuch, Netzeinbindung oder Dokumentations-Software (Papier oder digital)
	KRITISCH B Lagerung	Nach der Dokumentation	➤ Staub- und UV-geschützte ➤ Lagerung in Schrank oder Schublade	
*Zur behördlich geforderten Leistungsüberprüfung von Reinigungsprozessen ist eine Restproteinbestimmung, bundeslandspezifisch oder durch ALRPO (ProCheck) zyklisch durchzuführen (DPA/BCA). **Hinweis: Die viruzide Außendesinfektion kann mit einem geeigneten mit WL-cid Lösung getränkten Tuch, z. B. AlproVir-Wipes, ALPRO MaxiWipes reel*** oder Tork-Tuch***, Premium Spezial (gemäß VAH) erfolgen. ***Hinweis: getränkt mit WL-cid Lösung.				

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum/ reine Seite	Aufbereitung ALPRO-Adapter	Arbeitstäglich	1. Reinigung im Tauchbad oder im Ultraschall* 2. Zwischenspülung 3. Desinfektion im Tauchbad oder im Ultraschall* 4. Spülung 5. Trocknung Alternativ: Aufbereitung im RDG Gemäß Risikobewertung falls erforderlich im Anschluss Sterilisation	AlproZyme, ALPRO MEDICAL GMBH laut SAA nach Herstellerangabe Trinkwasser BIB forte eco, ALPRO MEDICAL GMBH laut SAA nach Herstellerangabe Trinkwasser WL-dry/WL-Blow, ALPRO MEDICAL GMBH
Aufbereitungs- raum	Reinigung der WL-Blow-Pistole	Nach Gebrauch	➤ Gründlich Abwischen mit einem Reinigungstuch	CleanWipes, ALPRO MEDICAL GMBH

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum	Desinfektion der WL-Blow-Pistole	Nach der Reinigung	➤ Gründlich Abwischen mit einem vorgetränktem Desinfektionstuch Zur viruziden Desinfektion: ➤ Umspülen der „WL-cid-Lösung“ der gesamten Oberflächen der WL-Blow, 5 Minuten einwirken lassen und trocknen	• MinutenWipes, ALPRO MEDICAL GmbH Alternativ zur viruziden Desinfektion: • AlproVir-Wipes, ALPRO MEDICAL GmbH • WL-cid, ALPRO MEDICAL GmbH • WL-dry, ALPRO MEDICAL GmbH • MaxiWipes <i>reel</i>, ALPRO MEDICAL GmbH
*hierbei sind Lufteinschlüsse durch eine aufrechte Positionierung zu vermeiden				

Unterweisung durch:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Personal)

Erstellt von:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

aktualisiert am:

Datum/Unterschrift (Personal)

