

Individuelle Arbeitsanweisung

Reinigung und Desinfektion von Absauganlagen für spezielle Anwendungen (Pulverstrahlanwendungen + Chirurgie, CHX, H₂O₂, NaOCl)



WAS	WANN	WIE	WOMIT
Reinigung der Saugschläuche und des Speischalengeweges	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vor und nach der Anwendung mit Calcium/Natriumbicarbonat (z.B. Pulverstrahlanwendungen) <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ chirurgischen Eingriffen von Montag - Donnerstag ➤ Zur Kontrareinigung am Freitag 	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <p>Die Reinigungs - und Desinfektionslösung wird für 2 Liter Gebrauchslösung in einer Konzentration von 5% oder 10 % AlproJet-W 100 ml oder 200 ml angesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> • erst warmes Trinkwasser (40-50 °C), • dann Konzentrat s. o. • und dann warmes Trinkwasser (40-50 °C) bis zu 2 Liter auffüllen. <p>Die Reinigungs - und Desinfektionslösung wird für 2 Liter Gebrauchslösung in einer Konzentration von 2 % (AlproJet-DD = 40 ml) oder 5% (AlproJet-D oder -W =100 ml) angesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erst warmes Trinkwasser (40-50 °C), • dann Konzentrat s. o. • und dann warmes Trinkwasser (40-50 °C) bis zu 2 Liter auffüllen. 	<ul style="list-style-type: none"> • AlproJet MixCup, ALPRO MEDICAL GMBH <p><u>Montag –Donnerstag:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • AlproJet-W, ALPRO MEDICAL GMBH (5-10%) <p><u>Freitag:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • AlproJet-DD, ALPRO MEDICAL GMBH • (2%) VAH zertifiziert

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Reinigung und Desinfektion der Speischale	Nach jeder Behandlung	Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen! ➤ Flächendesinfektionsmittel ➤ Speischalenreiniger ➤ Geeignete Reinigungsbürste	<ul style="list-style-type: none"> • MinutenWipes, ALRPO MEDICAL GMBH, • PlastiSept eco Wipes, ALRPO MEDICAL GMBH • MaxiWipes reel*, ALRPO MEDICAL GMBH mit <ul style="list-style-type: none"> - MinutenSpray-classic oder - PlastiSept eco, ALPRO MEDICAL GMBH getränkt • AlproCleaner, ALPRO MEDICAL GMBH
* Ansetzen der trockenen Tücher mit 2,5 L MinutenSpray-classic oder bei MaxiWipes reel 1,4 L und bei MaxiWipes-L reel 1,6 L PlastiSept eco , ALPRO MEDICAL GMBH			

Unterweisung durch:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Personal)

Erstellt von:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

aktualisiert am:

Datum/Unterschrift (Personal)