

Individuelle Arbeitsanweisung

Reinigung und Desinfektion von kontaminierten Flächen nach der Behandlung



WAS	WANN	WIE	WOMIT
Dentaleinheit und kontaminierte Flächen im Behandlungszimmer	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nach jedem Patienten ➤ Vor Arbeitsbeginn ➤ Bei sichtbarer Kontamination 	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ von minder kontaminiert zu hoch kontaminiert ➤ Lampe, Arztelement ohne Übertragungsinstrumente, Patientenstuhl, Helferinnenelement, Saugschläuche, Speischale ➤ Behandlungszeile, Griffe, externe Geräte (Röntgen-, Prophylaxe-Geräte etc.) 	<p><u>Alkoholfrei:</u></p> <p>PlastiSept eco*, ALPRO MEDICAL GMBH</p> <p>PlastiSept eco Wipes, ALPRO MEDICAL GMBH</p> <p>PlastiSept eco MaxiWipes, ALPRO MEDICAL GMBH</p> <p><u>Alkoholhaltig:</u></p> <p>MinutenSpray-classic*, ALPRO MEDICAL GMBH</p> <p>MinutenWipes, ALPRO MEDICAL GMBH</p> <p>MinutenWipes Maxi, ALPRO MEDICAL GMBH</p>
<p>* Ansetzen der trockenen Tücher mit 2,5 L MinutenSpray-classic oder bei MaxiWipes reel 1,4 L und bei MaxiWipes-L reel 1,6 L PlastiSept eco ALPRO MEDICAL GMBH</p>			

Hinweis:

Es empfiehlt sich bei einem Wechsel der Flächendesinfektionsprodukte vor der Verwendung eines neuen Präparates alle zu desinfizierenden Oberflächen gründlich mit einem neutralen Reinigungsmittel (Trinkwasser und Reinigungsmittel) zu reinigen und mit klarem Trinkwasser nach zu wischen, um mögliche Reaktionen von Remanenzwirkstoffen der Flächendesinfektionsmittel zu vermeiden!

Unterweisung durch:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Personal)

Erstellt von:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

aktualisiert am:

Datum/Unterschrift (Personal)