

Individuelle Arbeitsanweisung

Manuelle Reinigung und Desinfektion von Abformungen und zahntechnischen Werkstücken im Tauchbadverfahren



WAS	WANN	WIE	WOMIT
Reinigen und Desinfizieren der Desinfektionswanne Angaben zu: Produktname, Volumen in Liter, Ansatzdatum, Konzentration, Dokumentation	Vor dem erneuten Ansetzen der Reinigungs- und Desinfektionslösung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wanne entleeren ➤ Wanne mit Trinkwasser ausspülen ➤ ggf. mit geeigneter Bürste reinigen ➤ mit Desinfektionstuch die Wanne vollständig auswischen 	Kunststoffbürste <ul style="list-style-type: none"> - MinutenWipes, ALRPO MEDICAL GMBH, - MaxiWipes reel*, ALRPO MEDICAL GMBH getränkt mit - MinutenSpray-classic, ALRPO MEDICAL GMBH oder tränken mit - BCSan-100-Lösung, ALPRO MEDICAL GMBH
* Ansetzen der trockenen Tücher mit 2,5 L MinutenSpray-classic oder bei MaxiWipes reel 1,4 L und bei MaxiWipes-L reel 1,6 L PlastiSept eco , ALPRO MEDICAL GMBH			

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Abdruck der Reinigungs- und Desinfektionslösung ansetzen	2-3 Tage, wenn vom Hersteller durch Standzeitgutachten bestätigt und/oder bei sichtbarer Verschmutzung (z.B. Trübung, Ausflockung, Bildung von Schlieren)	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! Die Reinigungs- und Desinfektionslösung wird in die gereinigte und desinfizierte Desinfektionswanne gegeben. ➤ Lösung einfüllen ➤ Angaben zum Ansatzdatum ➤ Dokumentation	Geeignete Wanne Reinigungs- und Desinfektionslösung PrintoSept-ID , ALPRO MEDICAL GMBH (gebrauchsfertige Lösung) Hinweis: gebrauchte Lösung ist arbeitstäglich zu wechseln
<p>Abformungen</p> <p>Zahntechnische Werkstücke (z.B. Prothesen, Brücken, etc.) sachgerecht zur Desinfektion vorreinigen</p>	<p>Sofort nach jeder Entnahme aus dem Mund</p> <p style="text-align: center;">- - - - -></p>	<p>Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen. Kontaminationsgeschützter Transport, z.B. geeignete Desinfektionswanne mit Deckel/geschlossenes Tray, zum Aufbereitungsbereich</p> <p>➤ Abformung / zahntechnische Werkstücke unter fließendem Trinkwasser abspülen</p> <p>➤ Zur Vorreinigung zahntechnischer Werkstücke (z.B. Prothesen, Brücken etc.)</p> <p>➤ Alternativ: im Ultraschall oder in der Wanne</p> <p>Hinweis: erneutes Abspülen vor der Desinfektion</p>	 <p>TarClean, ALPRO MEDICAL GMBH</p> <p>10-20 % im Trinkwasser</p>

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Abformungen, zahntechnische Werkstücke (z. B. Prothesen, Brücken etc.) desinfizieren	<ul style="list-style-type: none"> ➤ nach dem Abspülen unter fließendem Trinkwasser ➤ vor dem Transport in das Labor ➤ nach dem Erhalt aus dem Labor 	<p>Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ blasenfreies Einlegen ➤ Abformungen und zahntechnische Werkstücke müssen vollständig mit der Lösung bedeckt sein ➤ Einwirkzeit 5 Min. 	<p>PrintoSept-ID, ALPRO MEDICAL GMBH (unverdünnt 5 Min.)</p> <p>Standzeit 2-3 Tage (je nach Schmutzeinlagerung)</p> <p>bei sichtbarer Verschmutzung (z. B. Trübung, Ausflockung, Bildung von Schlieren)</p>
Abschließend	Nach der Desinfektion	<p>Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ abspülen unter fließendem Trinkwasser ➤ trocken blasen 	<p>Fließendes Trinkwasser</p> <p>Druckluft (WL-Blow, ALPRO MEDICAL GMBH)</p>
Transport		<p>Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ verpackt zum Fremdlabor ➤ direkte Weiterverarbeitung im eigenen Labor 	

Unterweisung durch:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Personal)

Erstellt von:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

aktualisiert am:

Datum/Unterschrift (Personal)