

Individuelle Arbeitsanweisung



Autarke Betriebswasserversorgung sowie Reinigung und Desinfektion von Betriebswasserwegen ärztlicher, zahnärztlicher/oralchirurgischer Behandlungseinheiten mittels des ALPRO-BCS (BottleCareSystem), EN 1717 DIN 1988-100 konform



| WAS | WANN | WIE | WOMIT |
|---------------------------------------|------------------------|--|---|
| ALPRO-BCS , ALPRO MEDICAL GMBH | Täglich und bei Bedarf | Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen! ➤ Befüllen der ALPRO BCS -Druckflaschen mit 1.485 ml Trinkwasser ➤ und 1 % (15 ml) Desinfektionslösung (Messkappe) ➤ erst Trinkwasser (vorlegen) ➤ dann Konzentrat ➤ und dann Trinkwasser auffüllen. | Trinkwasser Alpron , ALPRO MEDICAL GMBH |

| WAS | WANN | WIE | WOMIT |
|--|--|--|--|
| Anbringen der vorbereiteten Flasche an der Flaschenaufnahme des ALPRO-BCS Systems | Täglich und bei Bedarf | <p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gefüllte Druckflasche in die Flaschenaufnahme des ALPRO-BCS Systems vorsichtig einschrauben ➤ durch Betätigen des Hebels (Stellung 1) an der Außenseite des ALPRO-BCS Systems die Druckflasche mit Druckluft beaufschlagen ➤ nun kann mit der Behandlung begonnen werden | ALPRO-BCS System und BCS-Flasche , ALPRO MEDICAL GMBH |
| Wechseln der Druckflasche (BCS-Flasche) Druckflasche (BCS-Flasche) entnehmen und Inhalt verwerfen | Bei entleerter BCS-Flasche Vor Arbeitsbeginn | <p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>BCS-Flasche im druckbeaufschlagten Zustand lösen</u>, bis die Luft hörbar entweicht. Anschließend Druckluft abschalten (Hebel in Stellung 0) ➤ danach die Druckflasche entnehmen und wieder befüllen (s. o.) oder durch eine schon vorbereitete Druckflasche ersetzen ➤ ins Speibecken oder Waschbecken entleeren | BCS-Flasche , ALPRO MEDICAL GMBH 1.485 ml Trinkwasser und 1 % Alpron , ALPRO MEDICAL GMBH (15 ml) |

| WAS | WANN | WIE | WOMIT |
|-----------------------------|--|--|---|
| Desinfektion der Wasserwege | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Am Ende des Arbeitstages ➤ Wochenende oder ➤ vor Urlaubsbeginn (längere Standzeiten) | <p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <p><u>Druckflasche</u> mit der Aufschrift Bilpron only mit mind. 200 ml Bilpron befüllen und in die Flaschenaufnahme drehen</p> <p>Druckbeaufschlagen s.o.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ alle Betriebswasserwege der Behandlungseinheit fluten bis Bilpron (blau) sichtbar austritt ➤ Druckflasche an der Behandlungseinheit belassen ➤ Einwirkzeit mind. 12 Std., max. 3 Monate | <p>BCS-Flasche, ALPRO MEDICAL GMBH</p> <p>Bilpron, ALPRO MEDICAL GMBH</p> <p>Messbecher (500 ml), ALPRO MEDICAL GMBH</p> |

| WAS | WANN | WIE | WOMIT |
|---|---|---|---|
| <p>Aufbereitung (Reinigung/ Desinfektion) der BCS-Druckflaschen</p> | <p>Bei sichtbarer Trübung/Verschmutzung; <u>mindestens jedoch 1 x wöchentlich</u></p> | <p>BC-San 100 (100 ml) komplett in die Druckflasche geben und mit Trinkwasser auffüllen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trinkwasser vorlegen • dann Konzentrat • dann Druckflasche vollständig mit Trinkwasser auffüllen. <p>➤ gefüllte Druckflasche mit Drehverschluss verschließen und erst bei Arbeitsbeginn Lösung verwerfen</p> <p>➤ oder gefüllte Druckflasche in die Flaschenaufnahme des ALPRO-BCS Systems vorsichtig einschrauben</p> <p>➤ Einwirkzeit mind. 6 Std. – max. über Nacht/Wochenende, anschließend Inhalt verwerfen</p> | <p>BCS-Flasche, ALPRO MEDICAL GMBH</p> <p>BC-San 100, ALPRO MEDICAL GMBH</p> |
| <p><u>Desinfektion des Gewindes der BCS-Druckflaschenaufnahme</u></p> <p><u>Desinfektion des Gewindes der BCS-Druckflaschenaufnahme und des Steigrohrs</u></p> | <p>Arbeitstäglich</p> | <p>Mit einem Desinfektionstuch Gewinde der BCS-Druckflaschenaufnahme gründlich reinigen und desinfizieren</p> | <p>MinutenWipes/ PlastiSept eco Wipes, ALPRO MEDICAL GMBH</p> <p>oder</p> <p>BC-San 100, ALPRO MEDICAL GMBH, Lösung, z.B. mit TORK-Tuch</p> |

Hinweis: Vor Arbeitsbeginn alle wasserführenden Wege 2 Minuten durchspülen (Grundlage: RKI Empfehlung 2006 Infektionsprävention in der Zahnheilkunde).

Hinweis: bei zu hoher Keimbelastung des Trinkwassers an der Entnahmestelle empfehlen wir den Einsatz eines Sterilfilters (REF 3582) ALPRO MEDICAL GMBH

Unterweisung durch:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Personal)

Erstellt von:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

aktualisiert am:

Datum/Unterschrift (Personal)