

Individuelle Arbeitsanweisung

Autarke Betriebswasserversorgung sowie Reinigung und Desinfektion von Betriebswasserwegen ärztlicher, zahnärztlicher/ oralchirurgischer Behandlungseinheiten EN 1717 DIN 1988-100 konform



WAS	WANN	WIE	WOMIT
Befüllen der Druckflaschen	Täglich und bei Bedarf	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Befüllen der Druckflaschen mit Trinkwasser ➤ und 1 % Desinfektionslösung (Messkappe) ➤ erst Trinkwasser ➤ dann Konzentrat ➤ und dann Trinkwasser auffüllen. 	<p>Trinkwasser</p> <p>Alpron, ALPRO MEDICAL GMBH</p>
Anbringen der vorbereiteten Druckflasche an der Flaschenaufnahme des Systems	Bei Bedarf	<p>Schutzhandschuhe, Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gefüllte Druckflasche in die Flaschenaufnahme des Systems vorsichtig adaptieren ➤ Druckflasche mit Druckluft beaufschlagen ➤ nun kann mit der Behandlung begonnen werden 	<p>Druckflasche und Flaschenaufnahme</p> <p>Schalter</p>

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Wechseln der Druckflasche	Bei Entleerung der Druckflasche	<p>Schutzhandschuhe, Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Druckflasche im druckbeaufschlagten Zustand lösen, bis die Luft hörbar entweicht. Anschließend Druckluft abschalten ➤ danach die Druckflasche entnehmen und wieder befüllen (s. o.) oder durch eine schon vorbereitete Druckflasche ersetzen 	<p>Druckflasche</p> <p>Trinkwasser</p> <p>1 % Alpron, ALPRO MEDICAL GMBH</p>
Desinfektion der Wasserwege	Am Ende des Arbeitstages, Wochenende oder vor Urlaubsbeginn (längere Standzeiten)	<p>Schutzhandschuhe, Schutzbrille tragen!</p> <p>Separate Druckflasche mit mind. 200 ml Bilpron befüllen und in die Flaschenaufnahme drehen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ alle wasserführenden Betriebswasserwege der Behandlungseinheit fluten bis Bilpron sichtbar austritt ➤ Druckflasche an der Behandlungseinheit belassen ➤ Einwirkzeit mind. 12 Std. max. 3 Monate 	<p>Druckflasche</p> <p>Bilpron, ALPRO MEDICAL GMBH</p> <p>Messbecher (500 ml), ALPRO MEDICAL GMBH</p>

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitung (Reinigung/ Desinfektion) der Druckflaschen	Bei sichtbarer Verschmutzung/Trübung; mindestens jedoch 1x wöchentlich	BC-San 100 (100 ml) komplett in die Druckflasche geben, mit Trinkwasser auffüllen und in die Flaschenaufnahme eindrehen ➤ Einwirkzeit mind. 6 Std. – max. über Nacht/Wochenende, anschließend Inhalt verwerfen	Druckflasche BC-San 100 , ALPRO MEDICAL GMBH

Hinweis: Vor Arbeitsbeginn alle wasserführenden Wege 2 Minuten durchspülen (Grundlage: RKI Empfehlung 2006 Infektionsprävention in der Zahnheilkunde)

Hinweis: bei zu hoher Keimbelastung des Trinkwassers an der Entnahmestelle empfehlen wir den Einsatz eines **Sterilfilters** (REF 3582) ALPRO MEDICAL GMBH

Unterweisung durch:

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

Datum/Unterschrift (Personal)

Erstellt von:

aktualisiert am:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

Datum/Unterschrift (Personal)