

Individuelle Arbeitsanweisung



Reinigung und Desinfektion von Abdrucklöffeln und Instrumenten in der Wanne oder im Ultraschall

WAS	WANN	WIE	WOMIT
<p>Reinigen und Desinfizieren der Wanne oder des Ultraschallgerätes</p> <p>Angaben zu:</p> <p>Produktname, Volumen in Liter, Ansatzdatum, Konzentration Dokumentation</p>	<p>Vor dem erneuten Ansetzen der Reinigungslösung</p>	<p>Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wanne oder Ultraschall entleeren ➤ Wanne oder Ultraschall mit Trinkwasser ausspülen ➤ ggf. mit geeigneter Bürste reinigen ➤ mit Desinfektionstuch Wanne oder Ultraschall vollständig auswischen oder ➤ fusselfreies Einmaltuch 	<p>Kunststoffbürste</p> <ul style="list-style-type: none"> - MinutenWipes, ALRPO MEDICAL GMBH - PlastiSept eco Wipes, ALPRO MEDICAL GMBH - MaxiWipes reel*, ALRPO MEDICAL GMBH getränkt mit MinutenSpray-classic ALRPO MEDICAL GMBH oder tränken mit PlastiSept eco, ALPRO MEDICAL GMBH - BCSan-100, ALPRO MEDICAL GMBH, Lösung
<p>Reinigungslösung ansetzen</p>	<p>2-3 Tage Standzeit, wechseln bei sichtbarer Verschmutzung (z. B. Trübung, Ausflockung, Bildung von Schlieren)</p>	<p>Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> • erst warmes Trinkwasser • dann Konzentrat • und dann warmen Trinkwasser auffüllen. 	<p>Geeignete Wanne oder Ultraschall</p> <p>Reinigungslösung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. warmem Trinkwasser 2. AlproSol ALPRO MEDICAL GMBH, 3-5 % je nach Verschmutzungsgrad

*Ansetzen der trockenen Tücher mit 2,5 L **MinutenSpray-classic** oder bei **MaxiWipes reel** 1,4 L und bei **MaxiWipes-L reel** 1,6 L **PlasitSept eco**, ALPRO MEDICAL GMBH

Chargendokumentation - Reinigung und Desinfektion der Behälter mit BC-San 100 Lösung lt. SAA für BC-San 100

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Abdrucklöffel, Instrumente etc. sachgerecht vorreinigen	Sofort nach dem Gebrauch	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! Kontaminationsgeschützter Transport, z.B. geeignete Desinfektionswanne mit Deckel/geschlossenes Tray, zum Aufbereitungsbereich ➤ Abdrucklöffel, Instrumente mit einer Bürste grob reinigen und/oder unter fließendem Trinkwasser abspülen	Trinkwasser
Abdrucklöffel, Instrumente etc. reinigen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nach dem Gebrauch ➤ Vor dem Transport in das Labor ➤ Nach dem Erhalt aus dem Labor 	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! <ul style="list-style-type: none"> ➤ blasenfreies Einlegen ➤ Abdrucklöffel, Instrumente etc. müssen vollständig mit der Lösung bedeckt sein ➤ Einwirkzeit mindestens 60 Min. Ultraschall 5-10 Min. 	AlproSol ALPRO MEDICAL GMBH, je nach Verschmutzungsgrad 3-5 % in der Wanne oder Ultraschall
Abschließend	Nach der Reinigung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! <ul style="list-style-type: none"> ➤ Abspülen unter fließendem Trinkwasser ➤ trocken blasen 	Fließendes Trinkwasser Druckluft WL-Blow , ALPRO MEDICAL GMBH

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Abdrucklöffel, Instrumente etc. desinfizieren	Nach der Reinigung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! <ul style="list-style-type: none"> ➤ blasenfreies Einlegen in Desinfektionswanne oder Ultraschall ➤ Abdrucklöffel, Instrumente etc. müssen vollständig mit der Lösung bedeckt sein ➤ Einwirkzeit, siehe Hinweis 	BIB forte eco , ALPRO MEDICAL GMBH 0,5–4 % in der Instrumentendesinfektionswanne oder Ultraschall
<p style="color: red; margin: 0;">Hinweis: BIB forte eco Lösung in der Desinfektionswanne: 0,5% - 60 Min. im Ultraschall: 3% - 10 Min. oder 4% - 5 Min.</p>			
Abschließend	Nach der Desinfektion	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! <ul style="list-style-type: none"> ➤ Abspülen unter fließendem Trinkwasser ➤ trocken blasen 	Fließendes Trinkwasser Druckluft WL-Blow , ALPRO MEDICAL GMBH
Transport		Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! <ul style="list-style-type: none"> ➤ verpackt zum Fremdlabor/Praxis ➤ direkte Weiterverarbeitung im eigenen Labor/Praxis 	

Unterweisung durch:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Personal)

Erstellt von:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

aktualisiert am:

Datum/Unterschrift (Personal)