

Individuelle Arbeitsanweisung

Reinigung und Desinfektion von Absauganlagen



WAS	WANN	WIE	WOMIT
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vor Behandlungsbeginn und ggf. zwischen den Behandlungen ➤ Nach blutigen Behandlungen 	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <p>Durchsaugen eines Luft-Wassergemisches</p>	<ul style="list-style-type: none"> - AlproJet MixCup, ALPRO MEDICAL GMBH - Kaltes Trinkwasser (mind. 1 Liter)
Reinigungs- und Desinfektionslösung ansetzen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mittags/abends nach Behandlungsende ➤ Nach Behandlung von Risikopatienten 	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <p>Die Reinigungs - und Desinfektionslösung wird für 2 Liter Gebrauchslösung in einer Konzentration von 2 % (Alprojet DD = 40 ml) oder 5% (Alprojet D oder -W =100 ml) angesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ erst warmes Trinkwasser (40-50 °C), ➤ dann Konzentrat s. o. ➤ und dann warmes Trinkwasser (40-50 °C) bis zu 2 Liter auffüllen. 	<ul style="list-style-type: none"> - AlproJet MixCup, ALPRO MEDICAL GMBH - <u>Montag – Dienstag</u> * - AlproJet-W, ALPRO MEDICAL GMBH (5%) - <u>Mittwoch – Freitag</u> * - AlproJet-DD, ALPRO MEDICAL GMBH (2%) VAH zertifiziert oder - AlproJet-D, ALPRO MEDICAL GMBH (5%) VAH zertifiziert
<p>*Hinweis: Bei zentralen Arbeitssystemen AlproJet-DD (oder AlproJet-D) und AlproJet-W wochenweise wechseln. Spezialanwendung: PZR, Chirurgie, H2O2, CHX und NaOCL siehe IAA AlproJet Spezialanwendung</p>			

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Reinigung und Desinfektion der Saugkanülenhandstücke	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nach jedem Patienten ➤ Mittags/abends nach Behandlungsende ➤ sowie bei erhöhter Belastung, mindestens wöchentlich 	<p>Außen abwischen mit einem geeigneten Desinfektionstuch (MinutenWipes, ALPRO MEDICAL GMBH)</p> <p>Zerlegen und blasenfreies Einlegen in geeignete Reinigungslösung (AlproZyme, ALPRO MEDICAL GMBH) und Desinfektionslösung (BIB forte eco, ALPRO MEDICAL GMBH)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - MinutenWipes, ALPRO MEDICAL GMBH - MaxiWipes reel*, ALPRO MEDICAL GMBH getränkt mit <ul style="list-style-type: none"> ○ MinutenSpray-classic, ALPRO MEDICAL GMBH - AlproZyme, ALPRO MEDICAL GMBH und - BIB forte eco, ALPRO MEDICAL GMBH
<p>* Ansetzen der trockenen Tücher mit 2,5 L MinutenSpray-classic oder bei MaxiWipes reel 1,4 L und bei MaxiWipes-L reel 1,6 L PlastiSept eco, ALPRO MEDICAL GMBH</p>			

Unterweisung durch:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Personal)

Erstellt von:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

aktualisiert am:

Datum/Unterschrift (Personal)