

Standardisierte Arbeitsanweisung

Manuelle Reinigung und Desinfektion von Übertragungsinstrumenten (ÜI)



WO	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Arbeitsplatz/ Zahnarztstuhl	Durchspülen der genutzten Übertragungsinstrumente	Nach Behandlungsende	<p>Schutzhandschuhe + Mund-Nase-Schutz + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ÜI mit Schleifinstrumenten am Instrumentenschlauch ➤ in die Speischale ➤ mind. 20 Sekunden durchspülen 	- Betriebswasser aus der Behandlungseinheit
	Kontaminationsgeschützter Transport vom Behandlungsplatz zum Aufbereitungsbereich	Nach dem Durchspülen	Schutzhandschuhe tragen!	<p>Behälter mit Deckel</p> <p>z. B. geschlossenes Tray oder geeignete Desinfektionswanne mit Deckel</p>

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum/ Unreine Seite	Vorbehandlung	Unmittelbar nach dem Transport	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen ➤ Schleifinstrument entfernen ➤ unter fließendem, kaltem Leitungswasser ggf. mit geeigneter Kunststoffbürste sichtbare Kontaminationen entfernen ➤ bei Einstufung KRITISCH B mit Wasserpistole und instrumentenspezifischen ALPRO-Adapter durchspülen	<ul style="list-style-type: none"> • Greifpinzette • Wasser + geeignete Kunststoffbürste (Einmalzahnbürste) • WaterJet, ALPRO MEDICAL GMBH • Instrumentenspezifischen ALPRO-Adapter
	Außenreinigung	Nach der Vorbehandlung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen Bei groben Verschmutzungen an ÜI mit geeigneten nicht proteinfixierenden Reinigungstüchern von außen abwischen Hinweis: Die Außenreinigung kann auch mit einem geeigneten mit WL-clean getränkten Tuch, z. B. ALPRO MaxiWipes reel oder Tork-Tuch, Premium Spezial (gemäß VAH) erfolgen.	z. B. CleanWipes, PlastiSept eco Wipes 50 oder MinutenWipes 50, ALPRO MEDICAL GMBH <ul style="list-style-type: none"> • WL-clean Lösung • z. B. ALPRO MaxiWipes reel oder Tork-Tuch, Premium Spezial (gemäß VAH)

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum/ Unreine Seite	Innenreinigung	Nach der Außenreinigung	<p>Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!</p> <p>➤ ÜI mit Reinigungslösung mit Hilfe geeigneten Adapter für 3 x 2 Sekunden in ein saugfähiges fusselfreies Tuch, z. B. ALPRO MaxiWipes reel oder Tork-Tuch, Premium Spezial (gemäß VAH), durchspülen/sprühen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • WL-clean*, ALPRO MEDICAL GMBH • geeigneter ALPRO-Adapter • Einwirkzeit 1 Minute <p>Hinweis: Bei erstmaliger Anwendung Verlängerung der Einwirkzeit auf 10 Minuten. siehe Gebrauchsanweisung</p> <p>Hinweis: Nicht auf Personen richten!</p>
	Innendesinfektion	Nach der Innenreinigung	<p>Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!</p> <p>➤ ÜI mit Desinfektionslösung mit Hilfe geeigneten Adapter für 2 x 3 Sekunden in ein saugfähiges fusselfreies Tuch, z. B. ALPRO MaxiWipes reel oder Tork-Tuch, Premium Spezial (gemäß VAH), durchspülen/sprühen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • WL-cid* Lösung (viruzid), ALPRO MEDICAL GMBH • geeigneter ALPRO-Adapter • Einwirkzeit 5 Minuten <p>Hinweis: Nicht auf Personen oder offene Flammen richten!</p>

*Achtung: bei der Anwendung Dose senkrecht halten

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum/ Unreine Seite	Außendesinfektion	Nach der Innendesinfektion	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! ➤ ÜI mit geeignetem Desinfektionstuch von außen abwischen Hinweis: Die viruzide Außendesinfektion kann mit einem geeigneten mit WL-cid Lösung getränkten Tuch, z. B. ALPRO MaxiWipes reel oder Tork-Tuch, Premium Spezial (gemäß VAH) erfolgen.	<ul style="list-style-type: none"> • MinutenWipes 50* • MinutenWipes Jumbo 50* • MinutenWipes Maxi* • MaxiWipes reel getränkt mit MinutenSpray-classic* (*begrenzt viruzid PLUS) • Einwirkzeit mind. 2 Minuten <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • WL-cid Lösung (viruzid) • z. B. ALPRO MaxiWipes reel oder Tork-Tuch, Premium Spezial (gemäß VAH) • Einwirkzeit (viruzid) mind. 5 Minuten
	Trocknung und Entfernung von Desinfektionsmittelrückständen*	Nach der Außendesinfektion	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! ➤ ÜI mit geeigneter Druckluft mit Hilfe eines geeigneten Adapters in ein saugfähiges, fusselfreies Tuch durchblasen ➤ Trocknung bis keine sichtbaren Rückstände mehr austreten	<ul style="list-style-type: none"> • WL-dry, ALPRO MEDICAL GMBH • WL-Blow, ALPRO MEDICAL GMBH • geeigneter ALPRO-Adapter • Dauer mind. 2 x 3 Sekunden Hinweis: Nicht auf Personen oder offene Flammen richten!
	Kontrolle	Nach der Außendesinfektion	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! ➤ Sichtkontrolle	ggf. Lupenbrille
	Pflege	Nach der Kontrolle	lt. Herstellerangabe Pflege	Geeignete Pflegemittel

***Zur behördlich geforderten Leistungsüberprüfung von Reinigungsprozessen ist eine Restproteinbestimmung zyklisch durchzuführen (DPA/BCA).**

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum/ Reine Seite	SEMIKRITISCH B	Nach der Pflege	Vor Tätigkeit auf der „Reinen Seite“ Schutzhandschuhe & Schutzkleidung wechseln	
	SEMIKRITISCH B Einklassifizierung	Nach der Desinfektion	➤ Schutzhandschuhe tragen! It. Individueller Risikoeinstufung	
	Freigabe	Nach der Risikoeinstufung	Durch freigabeberechtigte Person	Chargen Kontrollbuch oder Netzeinbindung durch Dokumentations-Software
	Verwendung/Lagerung des ÜI	Nach der Klassifizierung	Geeignete Lagerung abhängig der Klassifizierung	
	Verwendung des ÜI	Nach der Klassifizierung	bei Einstufung kritisch B	
	KRITISCH B Verpackung	Vor der Dampfsterilisation	➤ It. Herstellerangaben	<ul style="list-style-type: none"> • geeignete Einschweißfolie • geeignetes Einschweißgerät
	KRITISCH B Dampfsterilisation	Nach der Verpackung	➤ Beladung des Dampfsterilisators nach Herstellerangaben (Helixtest)	Geeigneter Dampfsterilisator

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitungsraum/ Reine Seite	KRITISCH B Kontrolle und Freigabe	Nach der Dampfsterilisation	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrolle auf Feuchtigkeit, Unversehrtheit der Verpackung ➤ Kontrolle Helixtest ➤ Prozessparameter ➤ Thermoindikator 	Sichtkontrolle Gerätekontrolle
	KRITISCH B Dokumentation	Nach der Kontrolle und Freigabe	Dokumentation durch freigabeberechtigte Person	Chargen Kontrollbuch oder Netzeinbindung des Sterilisators
	KRITISCH B Lagerung	Nach der Dokumentation	Staub- und UV-geschützte Lagerung in Schrank oder Schublade	

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
	Aufbereitung ALPRO-Adapter	Arbeitstaglich	Reinigung im Tauchbad oder im Ultraschall* Zwischenspulung Desinfektion im Tauchbad oder im Ultraschall* Spulung Trocknung Alternativ: Aufbereitung im RDG Gema Risikobewertung falls erforderlich im Anschluss Sterilisation	AlproZyme, ALPRO MEDICAL GMBH Trinkwasser BIB forte <i>eco</i> , ALPRO MEDICAL GMBH Trinkwasser WL-dry/WL-Blow, ALPRO MEDICAL GMBH
*hierbei sind Luft einschlusse durch eine aufrechte Positionierung zu vermeiden				

Wo	WAS	WANN	WIE	WOMIT
	Aufbereitung der WL-Blow-Pistole	Arbeitstaglich	Auenreinigung/-desinfektion mit einem getrankten Tuch Hinweis: Die viruzide Auendesinfektion kann mit einem geeigneten mit WL-cid Losung getrankten Tuch, z. B. ALPRO MaxiWipes reel oder Tork-Tuch, Premium Spezial (gema VAH) erfolgen.	<u>Alkoholfrei:</u> PlastiSept <i>eco</i> PlastiSept <i>eco</i> Wipes 50 PlastiSept <i>eco</i> JumboWipes 50 PlastiSept <i>eco</i> MaxiWipes <u>Alkoholhaltig:</u> MinutenSpray- <i>classic</i> MinutenWipes 50 MinutenWipes Jumbo 50 MinutenWipes Maxi <ul style="list-style-type: none"> • WL-cid Losung (viruzid) • z. B. ALPRO MaxiWipes reel oder Tork-Tuch, Premium Spezial (gema VAH) • Einwirkzeit mind. 5 Minuten

Unterweisung durch:

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

Datum/Unterschrift (Personal)

Dokumentation manuelle Aufbereitung

Formblatt IV kritisch B

<u>Chargennummer:</u>			
<u>Reinigung und Desinfektion (Hand- und Winkelstücke + Turbinen):</u>			
1. Sachgerechte Vorbereitung der Medizinprodukte wurden nach den aktuellen SAA durchgeführt			
2. Vorspülen Innen & Außen nach SAA			
3. Reinigung Innen & Außen nach SAA			
4. Desinfektion Innen & Außen nach SAA			
5. Trocknung Innen nach SAA			
6. Sichtkontrolle außen und Pflege innen nach SAA und Herstellerangaben			
7. Weitere Aufbereitung gemäß Risikobewertung, thermische Abschlußbehandlung gemäß KRINKO			
<u>Arbeitsschritte vollständig durchgeführt</u>	<u>ja</u> <u>nein</u>		
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>		

Freigabe

Datum: _____ Name/Unterschrift: _____

	<u>Durchgeführt</u>	
	<u>ja</u>	<u>nein</u>
Sterilisation nach SAA des Herstellers des Sterilisationsgerätes gemäß DIN EN ISO 13060		

Teilfreigabe von _____	bis	_____	<u>Arbeitsschritte vollständig durchgeführt</u>	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;"><u>ja</u></td> </tr> </table>	<u>ja</u>
<u>ja</u>					
Datum: _____		Name/Unterschrift: _____			