

Individuelle Arbeitsanweisung

Reinigung und umfassende Desinfektion von nicht thermisch aufzubereitenden Medizinprodukten semikritisch A + B

(z. Bsp. Lichtleiter, Polymerisationsleiter, Scanner und Optiken von Intraoralkameras)

WAS	WANN	WIE	WOMIT
<p>Reinigung und Desinfektion von nicht thermisch aufzubereitenden Medizinprodukten</p> <p>(z. B. Polymerisationslampen Lichtleiter, Scanner und Intraoralkameras)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nach jedem Patienten ➤ Vor Arbeitsbeginn 	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Reinigung</u>: kontaminierte Fläche von minder kontaminiert zu hoch kontaminiert gründlich abwischen ➤ <u>Desinfektion</u>: gereinigte Fläche mit einem fusselfreien, getränktem Tuch gründlich desinfizieren <p>➤ Empfehlung: Arbeitstäglich vorzugsweise abends mit Trinkwasser reinigen (neutralisieren)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigung/Desinfektion mit CleanWipes/ PlastiSept eco Wipes/ MinutenWipes, ALPRO MEDICAL GMBH 2. Umfassende Abschlussdesinfektion mit BC-San 100, ALPRO MEDICAL GMBH, gebrauchsfertig mit getränktem TORK-Tuch <p>Natriumhypochlorid</p> <p>Einwirkzeit 5 Minuten</p> <p>Trinkwasser</p>

Unterweisung durch:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Personal)

Erstellt von:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

aktualisiert am:

Datum/Unterschrift (Personal)