

Gebrauchsanweisung AlproJet MixCup



Hinweise zur Aufbereitung hinsichtlich der Arbeitsschritte und Standardarbeitsanweisungen (SAA) finden Sie auf unserer Website: www.alpro-medical.de oder können per Mail: info@alpro-medical.de oder telefonisch: +49 7725 9392-0 angefordert werden.



Inhalt

1. Benutzerhinweise	4
2. Verwendete Symbole auf den Produktinformationen, Etiketten und Gebrauchsanweisungen	4
3. Zielgruppe	4
4. Zweckbestimmungen – Bestimmungsgemäße Verwendung	5
5. Anwendung	5
6. Instandhaltung	6
7. Bestelldaten	6
8. Entsorgungshinweise	7
9. Vorkommnisse melden	7

1. Benutzerhinweise

Damit Sie störungsfrei, wirtschaftlich und sicher arbeiten können, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.

2. Verwendete Symbole auf den Produktinformationen, Etiketten und Gebrauchsanweisungen

	Gebrauchsanweisung beachten
	Achtung, sicherheitsbezogene Angaben
	Artikelnummer
	Medizinprodukt
	Produktidentifizierungsnummer
	Seriennummer
	Health Industry Bar Code
	CE-Symbol für ein Medizinprodukt der Klasse I
	Bevollmächtigter in Großbritannien
	Bevollmächtigter in der Schweiz
	Herstellungsdatum
	Hersteller, Firma ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen
	Firmensignet der Firma ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen

3. Zielgruppe

Diese Gebrauchsanweisung wendet sich an alle Anwender (Ärzte, Zahnärzte und das mit der Aufbereitung von Medizinprodukten beauftragte Fachpersonal sowie Hygienefachkräfte) in ärztlichen und zahnärztlichen Einrichtungen.

4. Zweckbestimmung – Bestimmungsgemäße Verwendung mit der AlproJet-Serie

AlproJet MixCup: Zum Ansetzen von AlproJet-Gebrauchslösungen zur Pflege und Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen.

AlproJet-D: Flüssigkonzentrat zur täglichen Desinfektion und gleichzeitigen Reinigung zahnärztlicher Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.

AlproJet-DD: Flüssigkonzentrat mit erweiterter Desinfektionswirkung zur täglichen Reinigung und Pflege zahnärztlicher Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.

AlproJet-W: Flüssigkonzentrat zur wöchentlichen sauren Kontrareinigung und Pflege zahnärztlicher Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.

5. Anwendung


 Der AlproJet MixCup darf nur mit der AlproJet-Serie verwendet werden!

AlproJet-D: 5%ige Anwendungskonzentration

AlproJet-DD: 2%ige Anwendungskonzentration

AlproJet-W: 5%ige Anwendungskonzentration

Für eine Anwendung werden 2 L Gebrauchslösung benötigt. Dazu über die Dosierkammer der Dosierflasche 2 x **AlproJet**-Konzentrat dosieren (Abb. 1) und im **AlproJet MixCup** (Abb. 2) mit Trinkwasser (Raumtemperatur) zu 2 L Gebrauchslösung auffüllen (Abb. 3). Anschließend 1 L Gebrauchslösung durch die Saugschläuche einsaugen (Abb. 4) und den restlichen 1 L in die Speischale geben (Abb. 5). Danach für mindestens 60 Minuten einwirken lassen und die Saugschläuche und die Speischale erst vor Arbeitsbeginn gut mit Wasser nachspülen.

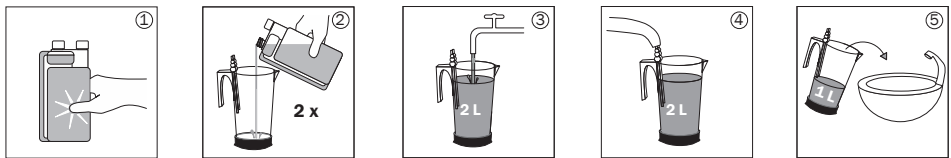

Für die Anwendung des AlproJet MixCup mit AlproJet-D, AlproJet-DD oder AlproJet-W bitte die Angaben auf dem jeweiligen Produktetikett beachten.

Anwendung nur durch medizinisches Fachpersonal mit entsprechender Schutzkleidung.

6. Instandhaltung

Sichtbare Verschmutzungen können mit AlproJet-D oder AlproJet-DD und einer Kunststoffbürste entfernt werden.

7. Bestelldaten

AlproJet-D

REF 3104	1 L Dosierflasche
REF 3100	10 L Kanister
REF 3124	StarterSet



AlproJet-DD

REF 3120	1 L Dosierflasche
REF 3115	5 L Kanister
REF 3125-N	StarterSet



AlproJet-W

REF 3106	1 L Dosierflasche
REF 3105	5 L Kanister
REF 3108	10 L Kanister



AlproJet MixCup

REF 3085	Multifunktionsbehälter mit 2-fach Adapter zur Pflege und Reinigung der Absauganlage
REF 3088	Multifunktionsbehälter mit 3-fach Adapter zur Pflege und Reinigung der Absauganlage
REF 3090	Anschlussadapter (2-fach) für AlproJet MixCup
REF 3091	Anschlussadapter (3-fach) für AlproJet MixCup



8. Entsorgungshinweise

Der AlproJet MixCup ist über den Restmüll zu entsorgen, die Verpackung kann über das Duale System recycelt werden.

9. Vorkommnisse melden

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse bitte melden an:

ALPRO MEDICAL GMBH

E-Mail: quality@alpro-medical.de

Tel.: **+49 7725 9392-0**

und der zuständigen Behörde für Deutschland:

Bundesinstitut für Arzneimittel und

Medizinprodukte (BfArM) www.bfarm.de



Hinweise zur Aufbereitung hinsichtlich der Arbeitsschritte und alle aktuellen Arbeitsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter, Gebrauchsanweisungen etc. finden Sie auf unserer Website: **www.alpro-medical.de**

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter **www.alpro-medical.de** oder telefonisch unter **+49 7725 9392-0** zur Verfügung.

Gerne können Sie auch unsere Außendienstmitarbeiter telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.