

AlproJet-Serie

Unser Team für die Reinigung und Desinfektion von Absauganlagen:
AlproJet-D mit AlproJet-W oder AlproJet-DD mit AlproJet-W

AlproJet-D

Flüssigkonzentrat zur täglichen Desinfektion und gleichzeitigen Reinigung zahnärztlicher Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.

AlproJet-DD

Flüssigkonzentrat mit erweiterter Desinfektionswirkung zur täglichen Reinigung und Pflege zahnärztlicher Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.

AlproJet-W

Flüssigkonzentrat zur wöchentlichen sauren Kontrareinigung und Pflege zahnärztlicher Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.



Reinigung und Desinfektion von Absauganlagen mit der AlproJet-Serie

Empfehlung und Dosierung



1

Nach jeder Behandlung 1–2 Becher kaltes Wasser absaugen und Speischalen-spülung 30 s betätigen.



- 1 Dosierkammerverschluss leicht öffnen.
- 2 Durch Drücken der Flasche AlproJet dosieren.
- 3 **AlproJet-D:** 2 x 50 ml
AlproJet-DD: 2 x 20 ml
AlproJet-W: 2 x 50 ml
- 4 AlproJet-D/-DD/-W in den AlproJet MixCup füllen.
- 5 Mit Trinkwasser zu 2 L Gebrauchslösung auffüllen.
- 6 Saugschläuche auf die AlproJet MixCup-Adapter aufstecken (Spraynebel-sauger auf den Ansatz

mit der großen Öffnung, Speichelsauger auf den Ansatz mit der kleinen Öffnung) und 1 L Gebrauchslösung absaugen.

- 7 Verbliebene Lösung (1 L) schluckweise in die Speischale geben und einwirken lassen.


- 8 Einwirkzeit optimal über Nacht/Wochenende, jedoch mind. 60 Minuten.

Saugschläuche und Speischale erst vor Arbeitsbeginn gut mit Wasser nachspülen.

Mit Amalgamabscheider in der Einheit:



Bei zentralem Amalgamabscheider: Wöchentlicher Wechsel

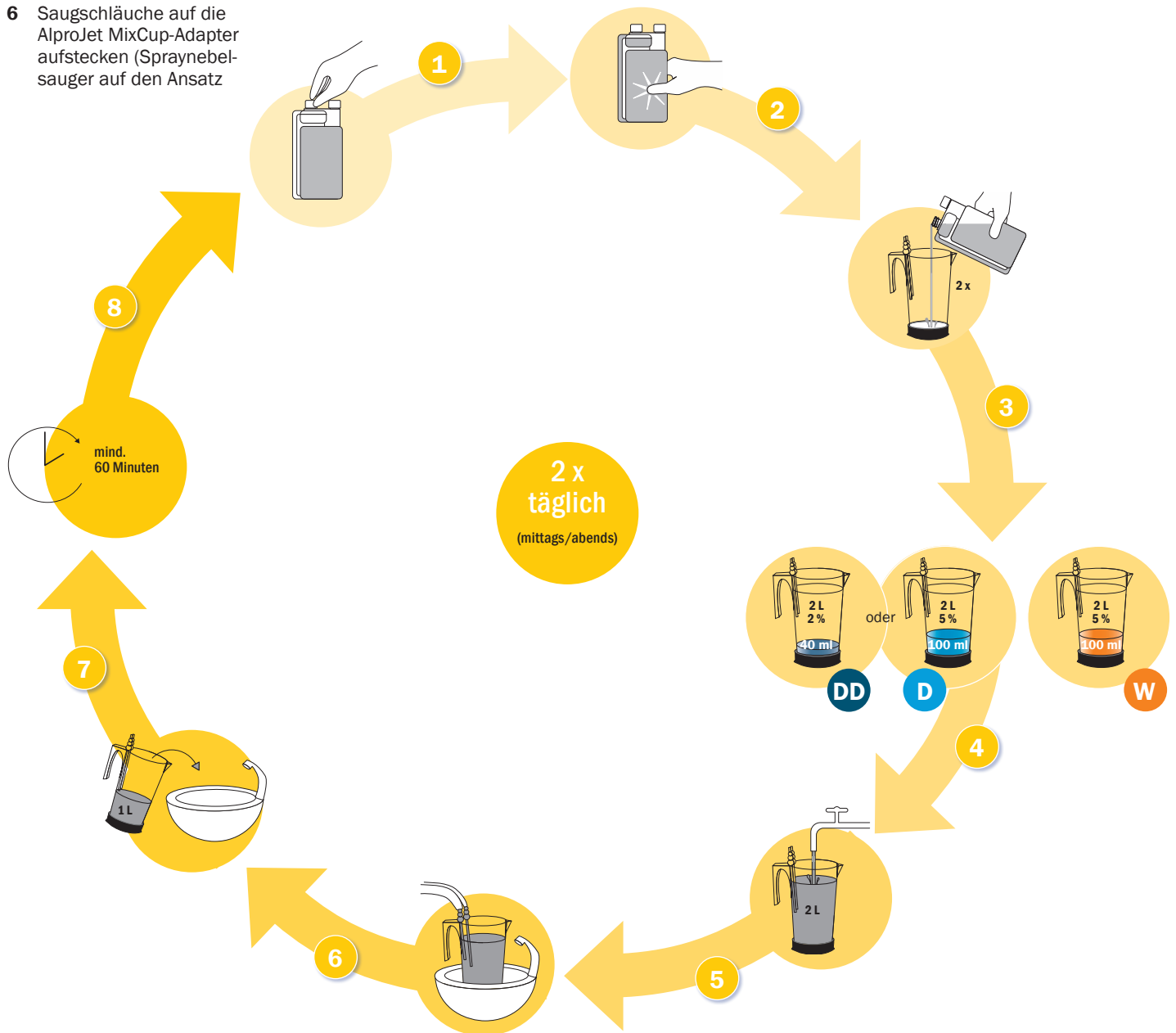

Anwendung von AlproJet-W bei chirurgischen Arbeiten

zur Vermeidung von Ablagerungen, Neutralisation von Wasserstoffperoxid, Reduzierung der Schaumbildung und Lösung von koaguliertem Blut



2

Nach jeder Behandlung 1–2 Becher kaltes Wasser absaugen und Speischalen-spülung 30 s betätigen.



Vor chirurgischen Arbeiten:


- 1 Dosierkammerverschluss leicht öffnen.
- 2 Durch Drücken der Flasche AlproJet-W dosieren.
- 3 **AlproJet-W:** 2 x 50 ml
- 4 AlproJet-W in den AlproJet MixCup füllen.
- 5 Mit kaltem Trinkwasser zu 1 L Gebrauchslösung (10%ig) auffüllen.

Bei bereits koaguliertem Blut in der Einheit:

- 5a Mit 40–50 °C warmem Trinkwasser zu 1 L Gebrauchslösung (10%ig) auffüllen.
- 6 Saugschläuche in den AlproJet MixCup eintauchen und Gebrauchslösung absaugen.

Resultat:

Der Lösungsvorgang wird beschleunigt, Rückstände werden pumpengängig und somit leichter abtransportiert.

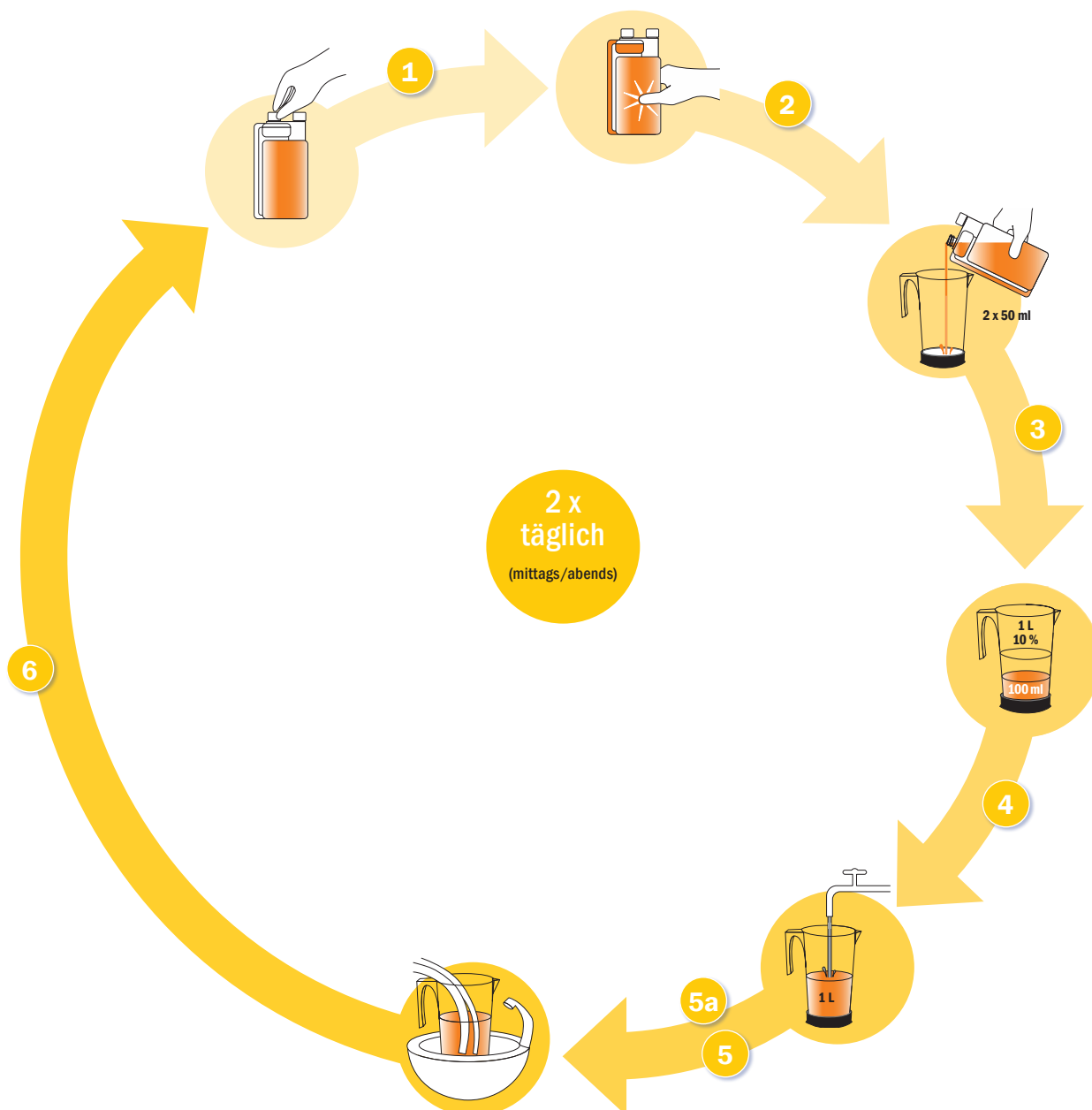

Anwendung von AlproJet-W vor Prophylaxebehandlungen

zur Vermeidung von Inkrustierungen, Schaumbildung und Saugaussetzern, z.B. durch Pulverstrahlssysteme



3



Nach jeder Behandlung 1-2 Becher kaltes Wasser absaugen und Speischalen-spülung 30 s betätigen.

- 1 Dosierkammerverschluss leicht öffnen.
- 2 Durch Drücken der Flasche AlproJet-W dosieren.
- 3 **AlproJet-W:** 4 x 50 ml
- 4 AlproJet-W in den AlproJet MixCup füllen.
- 5 Mit kaltem Trinkwasser zu 2 L Gebrauchslösung (10%ig) auffüllen.
- 6 Saugschläuche auf die AlproJet MixCup-Adapter aufstecken (Spraynebelsauger auf den Ansatz mit der großen Öffnung, Speichelsauger auf den Ansatz mit der kleinen Öffnung) und 1 L Gebrauchslösung absaugen.
- 7 Verbliebene Lösung (1 L) schluckweise in die Speischale geben.

Resultat:

Die schäumenden Rückstände werden bei der Behandlung neutralisiert/beseitigt und Saugaussetzer verhindert.



Grundreinigung mit AlproJet-W bei Produktumstellung

eine Woche 2 x täglich durchführen




4

- 1 Dosierkammerverschluss leicht öffnen.
- 2 Durch Drücken der Flasche AlproJet-W dosieren.
- 3 **AlproJet-W**: 4 x 50 ml
- 4 AlproJet-W in den AlproJet MixCup füllen.
- 5 Mit 40–50 °C warmem Trinkwasser zu 2 L Gebrauchslösung (10%ig) auffüllen.
- 6 Saugschläuche auf die AlproJet MixCup-Adapter aufstecken
- 7 Verbliebene Lösung (1 L) schluckweise in die Speischale geben und einwirken lassen.
- 8 Punkt 3–7 wiederholen (insgesamt 2 x durchführen).
- 9 1–2 Stunden einwirken lassen und mit 40–50 °C warmem Wasser nachspülen.

Resultat:

Der Reinigungsvorgang wird beschleunigt, Rückstände werden pumpengängig

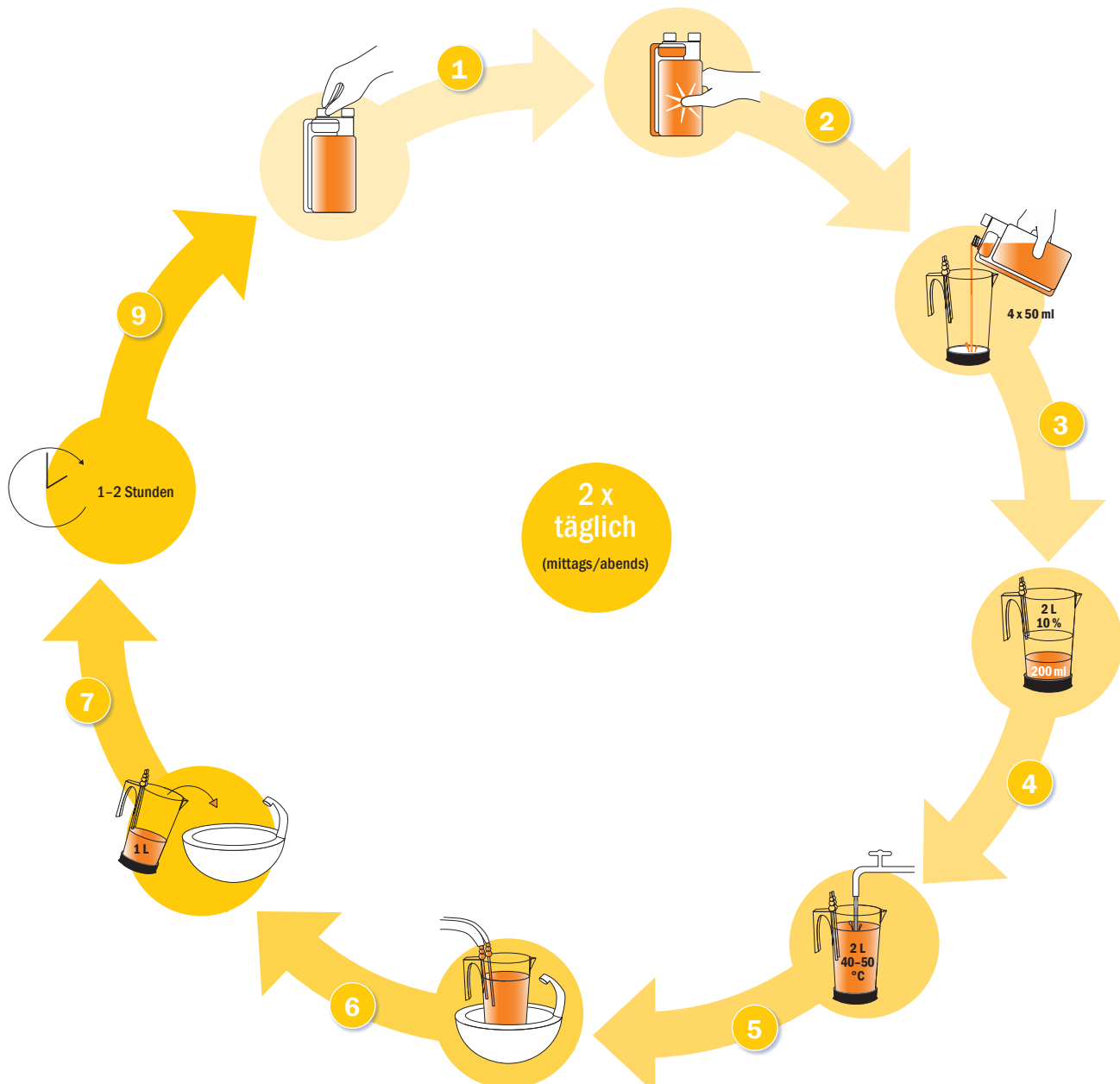

Hygienefortbildung

in Ihrer Praxis

Sie möchten gerne an einer Hygienefortbildung von ALPRO teilnehmen, aber es gibt keinen Termin in Ihrer Nähe?

Dann holen Sie sich die Fortbildung einfach in Ihre Praxis!

Der für Sie zuständige ALPRO-Medizinprodukteberater erläutert Ihnen alles rund um die aktuellen Richtlinien und Vorgaben der Behörden sowie Praxisbegehungen. Unser Mitarbeiter macht einen Praxischeck und Sie erarbeiten gemeinsam einen individuellen Hygieneplan. Nach der Fortbildung erhalten Sie einen Hygiene-Ordner inklusive einer CD mit allen relevanten Unterlagen wie beispielsweise Sicherheitsdatenblätter oder standardisierte Arbeitsanweisungen. Zudem stellen wir dem Praxisteam ein Zertifikat nach den Vorgaben der Leitlinie der BZÄK (Pkt.) aus.

Dauer: 3 - 4 Stunden
Kosten: Material für 550,- Euro*
Zusatzoption: jährliches Hygieneupdate
Kosten: Material für 250,- Euro*

Sie würden gerne einen Termin vereinbaren oder an einer unserer Fortbildungen teilnehmen?

Melden Sie sich bei Ihrem zuständigen Medizinprodukteberater, den Sie unter www.alpro-medical.de finden oder senden Sie eine Nachricht an info@alpro-medical.de unter Angabe Ihrer Adresse und Telefonnummer. Wir melden uns dann gerne umgehend bei Ihnen.

Ihr ALPRO-Team

* Die genannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich pro Fortbildung und zzgl. MwSt.



Unsere Lösungen für Ihre gesamte Praxishygiene



Reinigung und Desinfektion für spezielle Anwendungen – Absauganlagen



Händereinigung, -desinfektion und -pflege



Manuelle Instrumentenreinigung und -desinfektion



Oberflächenreinigung und -desinfektion




Mundspülung



Betriebswasserentkeimung



 ALPRO MEDICAL GMBH Tel. +49 7725 9392-0
Mooswiesenstr. 9 Fax +49 7725 9392-91
78112 St. Georgen www.alpro-medical.de
Deutschland info@alpro-medical.de