

## Freigabe der ALPRO TR-Linie für den „MELAtherm“

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen einen Auszug aus der Gebrauchsanweisung des MELAtherm im Bezug auf die Freigegebenen Prozessmedien von MELAG:

**MELAG**

Freigegebene Prozessmedien  
MELAtherm<sup>®</sup>10

### Freigegebene Prozessmedien



**HINWEIS!**

Beachten Sie auch die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise des Herstellers der Prozessmedien. Bei negativem Einfluss der Prozessmedien auf das Material der Instrumente und den MELAtherm<sup>®</sup>10 trotz Beachten der Herstellerhinweise trägt der Hersteller der Prozessmedien die Verantwortung.

Sollten Prozessmedien eingesetzt werden, die nicht von MELAG freigegeben sind, übernimmt MELAG für eventuelle Schäden am Gerät sowie an den Instrumenten keine Haftung.



**WICHTIG!**

Es dürfen nur Prozessmedien **eines einzigen** Herstellers verwendet werden. Kombinationen aus Medien verschiedener Hersteller sind nicht zugelassen.

Eine Umstellung auf eine andere freigegebene Kombination darf nur durch geschulte Servicepartner erfolgen.

Die Dosierkonzentration muss nach Angaben des Herstellers der Prozessmedien durch den Service-Techniker bei Aufstellung je nach den örtlichen Gegebenheiten individuell angepasst werden.

Für MELAtherm 10, die ab 01.07.2012 in Verkehr gebracht wurden, wurden folgende Kombinationen von Prozessmedien auf Materialverträglichkeit mit Komponenten innerhalb des Gerätes getestet:

Hersteller	Reiniger	Neutralisator	Klarspüler
<b>Alpro*</b>	<b>TR-3</b>	<b>TR-Neutralizer</b>	<b>TR-Clear</b>
<b>B. Braun</b>	Helimatic cleaner alkaline	Helimatic neutralizer C	Helimatic rinse neutral
<b>Bode</b>	Dismoclean 21 clean	Dismoclean 25 acid	Dismoclean 64 neutra-dry
<b>Borer*</b>	deconex 28 ALKA ONE-x deconex 22 LIQ-x	deconex 25 ORGANACID deconex 26 MINERALACID	deconex 64 NEUTRADRY
<b>Dr. Schumacher</b>	Thermoton Cleaner	Thermoton N	Thermoton clear
<b>Dr. Weigert</b>	neodisher MediClean forte neodisher MediClean Dental	neodisher N neodisher Z neodisher N dental neodisher Z dental	neodisher MediKlar neodisher MediKlar dental neodisher MediKlar special
<b>Schülke +</b>	Thermodent alka clean Thermosept RKF forte Thermosept alka clean forte	Thermodent neutralizer Thermosept NKP	Thermodent clear Thermosept BSK
<b>Henry Schein</b>	Eurosept Thermo Cleanser	Eurosept Thermo Neutralizer	Eurosept Thermo Rinse

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen  
ALPRO MEDICAL GMBH