

AlproJet-Serie

Gebrauchsempfehlung

Reinigung und Desinfektion von zahnärztlichen und medizinischen Absauganlagen

AlproJet-DD

AlproJet-DD (d = daily) wird 2%ig angewendet und ist für die tägliche alkalische Reinigung, Desinfektion und Pflege (u. a. Speichel, Säuren) aller zahnärztlichen und medizinischen Absauganlagen ausgelegt. AlproJet-DD sollte **2 x täglich (mittags und abends)** eingesetzt werden.

Anwendungsbeschreibung für 2 L Gebrauchslösung:

Dosierkammerverschluss öffnen, die Dosierflasche drücken, bis die Dosierkammer zur „20 ml“-Marke gefüllt ist.

2 Dosierungen (40 ml) mit 40 - 50 °C warmem Wasser im AlproJet MixCup zu 2 L Gebrauchslösung auffüllen

Saugschläuche aufstecken,

Spraynebelsauger auf den Ansatz mit der großen Öffnung und den **Speichelsauger auf den Ansatz mit der kleinen Öffnung** des AlproJet MixCups stecken. Durch die unterschiedlichen Schlauchlängen im AlproJet MixCup erhält der Speichelsauger zusätzlich 200 ml, dies verbessert das Reinigungsergebnis im Speichelsauger.

Danach **bleibt 1 L Gebrauchslösung im AlproJet MixCup**. Die verbleibende Lösung im AlproJet MixCup schluckweise in die Speischale geben und einwirken lassen. Erst **vor Arbeitsbeginn** gut mit **Wasser nachspülen** (sowohl Speischale als auch die Saugschläuche), um noch nachträglich gelöste Rückstände herauszuspülen.



AlproJet-D

AlproJet-D 5%ig ist für das tägliche alkalische Reinigen, Desinfizieren, Neutralisieren und Pflegen (u. a. Speichel, Säuren) aller zahnärztlichen Absauganlagen ausgelegt.

AlproJet-D sollte **2 x täglich** eingesetzt werden.

Anwendung:

Bei **AlproJet-D** werden 50 ml pro 1 L Gebrauchslösung benötigt. Auch hier mit Hilfe der **AlproJet-D – Dosierflasche 2 x 50 ml** dosieren und im AlproJet MixCup **mit 40 - 50 °C warmem Wasser zu 2 L Gebrauchslösung auffüllen**. Handhabung siehe AlproJet-DD.



AlproJet-W

AlproJet-W (W = weekly) ist ein **Spezialpräparat** und wird als **5-10%ige** Gebrauchslösung **eingesetzt**. AlproJet-W wird als saures Kontrareinigungspräparat **an 2 Tagen in der Woche** anstelle von AlproJet-D oder AlproJet-DD angewandt. Die Anwendung sollte auch hier **2 x täglich** erfolgen. AlproJet-W ist vorwiegend **zum Lösen von Protein und Inkrustierungen aus Kalk** konzipiert. Das bei chirurgischen Arbeiten anfallende Blut kann somit leichter aus Abscheide- und Zentrifugensystemen in den Abfluss geleitet werden.



Gebrauchsempfehlung bei besonderen Anwendungen:


Z. B. vor einer chirurgischen Arbeit (wegen möglicher Schaumbildung durch Blut und Wasserstoffperoxid) **1 L kalte 5%ige AlproJet-W-Lösung über die Schläuche in das System saugen**.

Ablagerungen werden verhindert, Wasserstoffperoxid im Auffangbehälter neutralisiert und die Schaumentwicklung reduziert. **In diesem Fall sollte AlproJet-W mit kaltem Wasser angemischt werden.**

Bei starker Verschmutzung bzw. bereits koaguliertes Blut eine 50 – 60 °C warme AlproJet-W-Lösung 10%ig anwenden.

Resultat:

Der **Lösungsvorgang** wird **beschleunigt**, Rückstände werden pumpengängig und somit **leichter abtransportiert**.

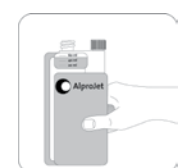

AlproJet-Serie

weitere Gebrauchsempfehlung bei besonderen Anwendungen:

Bei Prophylaxebehandlungen:

Das Arbeiten mit **Pulverstrahl-Geräten** (z. B. Airflow, Natriumbicarbonat) und Polierpasten können zu Inkrustierungen, Schaumbildung (Tenside/Emulgatoren) wie auch Saugaussetzern führen.

Lösung:

Vor der Behandlung eine 10%ige kalte AlproJet-W-Lösung (1 L) in das Absaugsystem einsaugen.

Resultat:

Die schäumenden **Rückstände werden neutralisiert/beseitigt** und Saugaussetzer verhindert.

Grundreinigung mit AlproJet-W:

3 – 5 L AlproJet-W 10%ige Anwenderkonzentration. Lösung absaugen,
1 – 2 Std. einwirken lassen und mit 50 °C heißem Wasser nachspülen.

Resultat:

Der **Lösungsvorgang wird beschleunigt**, Rückstände werden **pumpengängig** und somit **leichter abtransportiert**.



weitere Gebrauchsempfehlungen:

Einzelplatzamalgamabscheider:

Je nach Arbeitsweise **2 x wöchentlich AlproJet-W (Montag und Dienstag)** und **3 x wöchentlich AlproJet-DD/AlproJet-D (Mittwoch bis Freitag)** verwenden. Bei **hohem Proteineintrag** kann auch **3 x wöchentlich mit AlproJet-W** gearbeitet werden und **2 x wöchentlich mit AlproJet-D/AlproJet-DD**.



Zentrale Abscheide- und Separationssysteme:

Bei zentralen Nassabsaugsystemen (lange Abflusswege) **AlproJet-DD/D + AlproJet-W** im wöchentlichen Wechsel **2 x tägl. anwenden**.

Einwirkzeit: mindestens 30 Minuten! (am Besten in der Mittagszeit oder über Nacht)

Erst **vor Arbeitsbeginn (morgens oder nach der Mittagszeit)** Saugschläuche und Speischale **gut mit Wasser nachspülen** (z. B. mehrmaliges Betätigen der Speischalenspülung).

Durch die ausgezeichnete Materialverträglichkeit wird das **komplette System auch bei langen Einwirkzeiten nicht geschädigt!** Dies wird durch **regelmäßige neutrale Untersuchungen** immer wieder bestätigt (u. a. von Dentsply Sirona).

Diverse Gutachten stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung!

Grundsätzliche Anwendungsempfehlungen:

Einzelplatzamalgamabscheider:

Nach jeder Behandlung am Patienten:

1 – 2 Becher kaltes Wasser absaugen, Speischalenspülung 30 sec. betätigen (ca. 0,5 – 1 L)!



made
in
Germany

Sicher. Sauber. **ALPRO.**

ALPRO MEDICAL GMBH • Mooswiesenstraße 9 • 78112 St. Georgen • Germany
Tel.: + 49 77 25 9392-0 • Fax: +49 77 25 9392-91 • www.alpro-medical.com • info@alpro-medical.de

ALPRO[®]
ALPRO MEDICAL GMBH