

Anleitung zur Aufbereitung des Wandspenders für 1 L und 500 ml „Euroflaschen“

Schritt 1

Die glatten Oberflächen des ALPRO Wandspenders ermöglichen eine einfache Reinigung und Desinfektion z. B. mit ALPRO MinutenWipes oder PlastiSept-Wipes eco.

Zur Aufbereitung des Pumpensystems zunächst die Tropfschale zur gründlichen Reinigung und Desinfektion abziehen.

Öffnen Sie das Gehäuse.

Für das Ausbauen der Pumpe empfehlen wir die Nutzung eines geeigneten Werkzeugs (z. B. einen Spatel).

Mit Hilfe des Werkzeugs die Pumpenarretierung anheben und gleichzeitig die Pumpe nach vorn herausziehen.



Schritt 2

Zur Aufbereitung des Pumpensystems eine gebrauchsfertige Lösung z. B. mit AlproZyme 1%ig ansetzen und die Pumpe in die Lösung legen. Sodann 3 x pumpen bis sich die Lösung blasenfrei im Inneren der Pumpe befindet und die Lösung 15 Minuten einwirken lassen.



Einwirkzeit:
15 Minuten

Zur umfangreichen Desinfektion legen Sie die Pumpe im Anschluss in eine 1%ige Lösung mit BIB forte eco, verfahren Sie wie oben beschrieben (unter Berücksichtigung der persönlichen Schutzausrüstung) und lassen Sie die Lösung 30 Minuten einwirken.



Einwirkzeit:
30 Minuten



Schritt 3

Zum Klarspülen legen Sie die Pumpe für 30 Minuten in Trinkwasser ein und betätigen Sie die Pumpe mindestens 6 x zum Spülen der Innenflächen.



Einwirkzeit:
30 Minuten

Schritt 4

Wischen Sie die Pumpe mit einem Einmaltuch trocken.

Schritt 5

Den Spender in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Nach dem Einsetzen einer neuen Flasche AlproSept-HD oder CREMANA®-wash den Pumpenhebel 4-5 x betätigen um gegebenenfalls Wasserrückstände (aus dem Klarspülvorgang) zu entfernen. Danach ist der Spender für die weitere Nutzung einsatzbereit.



Wir empfehlen die Reinigung und Desinfizierung des Spenders spätestens bei jedem Flaschenwechsel durchzuführen.