

Standardisierte Arbeitsanweisung

Reinigung und Desinfektion von Absauganlagen



| WAS | WANN | WIE | WOMIT |
|---|--|--|---|
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ➤ vor Behandlungsbeginn und ggf. zwischen den Behandlungen ➤ nach blutigen Behandlungen | <p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <p>Durchsaugen eines Luft-Wassergemisches</p> | <p>AlproJet MixCup</p> <p>Kaltes Wasser (mind. 1 Liter)</p> |
| Reinigungs- und Desinfektionslösung ansetzen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ nach Behandlungsende Mittag/Abend ➤ nach Behandlung von Risikopatienten | <p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <p>Die Absauganlagenlösung wird in einer Konzentration von 2 % oder 5% angesetzt (20 oder 50 ml auf 1 Ltr. mit Wasser auffüllen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ erst Wasser, dann Konzentrat ➤ Absauggefäß mit warmen Wasser (40°C – 50 °C) füllen ➤ Konzentrat abmessen und hinzufügen ➤ gut mischen | <p>AlproJet MixCup</p> <p><u>Montag – Dienstag</u> * AlproJet-W (5%) siehe SAA Spezialanwendung</p> <p><u>Mittwoch – Freitag</u> * AlproJet-DD (2%) VAH zertifiziert (0,5% - 60 Min. 1 % - 30 Min.)</p> <p style="text-align: center;">oder</p> <p>AlproJet-D (5%)</p> |
| Reinigung und Desinfektion der Saugschläuche und Speischale | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 – 2 mal täglich; ➤ mind. abends nach Behandlungsende | <p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <p>2 Ltr. gebrauchsfertige Lösung, davon 1 Ltr. durch die Saugschläuche &</p> <p>1 Ltr. schluckweise in die Speischale</p> <p>Hinweis: Nicht gleich mit Wasser nachspülen, Lösung kann über Nacht im System verbleiben.</p> | <p>AlproJet MixCup</p> <p>AlproJet-DD (2%) VAH zertifiziert (0,5% - 60 Min. 1 % - 30 Min.)</p> <p style="text-align: center;">oder</p> <p>AlproJet-D (5%) AlproJet-W (5%)</p> |

* Hinweis: Bei zentralen Arbeitssystemen AlproJet-DD (oder AlproJet-D) und AlproJet-W wochenweise wechseln.

| WAS | WANN | WIE | WOMIT |
|---|---|--|---|
| Reinigung und Desinfektion der Saugschläuche und Speischale | <ul style="list-style-type: none"> ➤ nach jedem Patienten ➤ vor Behandlungsbeginn ➤ nach blutigen Behandlungen | Abwischen mit einem geeignetem Desinfektionstuch | MinutenWipes PlastiSept-Wipes <i>eco</i> MaxiWipes mit MinutenSpray- <i>classic</i> oder PlastiSept <i>eco</i> getränkt |
| Reinigung und Desinfektion der Saugkanülen und Saugkanülenaufnahmen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mittags und abends, sowie bei erhöhter Belastung | Außen abwischen mit einem geeigneten Desinfektionstuch (MinutenWipes) Blasenfreies Einlegen in geeignete Reinigungslösung (AlproZyme) und Desinfektionslösung (BIB forte <i>eco</i>) | MinutenWipes PlastiSept <i>eco</i> AlproZyme und BIB forte <i>eco</i> |

Unterweisung durch:

Praxisbetreiber

zur Kenntnis genommen:

Personal