

# Standardisierte Arbeitsanweisung

## Vorreinigung von Winkelstücken und Turbinen und thermische Desinfektion im RDG



WAS	WANN	WIE	WOMIT
Vorbereitung	Sofort nach jeder Behandlung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen  ➤ ggf. grobe Verschmutzungen entfernen.	<b>Clean Wipes</b> , Alpro Medical
Transport	Sofort nach jeder Behandlung	kontaminationsgeschützer Transport zum Aufbereitungsbereich	- geeignete Desinfektionswanne - verschließbare Trays - Kassettensysteme
Reinigung	Nach dem Transport	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!  ➤ Geeigneten Adapter mit dem Instrument oder WL-Clean verbinden  ➤ Mit WI-Clean <b>3 Sprühstöße a 2 Sekunden</b> durch das Instrument in ein fuselfreies Tuch sprühen  ➤ Mindestens 1 Minuten einwirken lassen	Adapter von Alpro Medical  WL-Clean Alpro-Medical
Beladung des RDG	Nach der Reinigung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!  ➤ nach Herstellerangabe	nach Herstellerangabe
<b>ACHTUNG : Desinfektion nur bei validiertem Thermodesinfektor möglich</b>			

<b>WAS</b>	<b>WANN</b>	<b>WIE</b>	<b>WOMIT</b>
Desinfektion	Nach der Beladung	➤ starten des RDG nach Herstellerangaben	
Kontrolle	Nach der Desinfektion im RDG	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! ➤ Prüfung auf Sauberkeit und Funktion ggf. Instandsetzung ➤ wenn Mängel vorhanden ab dem Punkt „Reinigung“ nochmals beginnen	
Trocknen	Nach der Kontrolle	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! ➤ Instrumententrocknung mit Druckluft  Lt. Herstellerangaben	- Druckluft <b>WL-Blow</b>  Lt. Hersteller (ggf. Chargenkontrollbuch, Netzwerkeinbindung)
Dokumentation	Nach Trocknung		
Pflege	Vor der Dampfsterilisation	Schutzhandschuhe tragen! ➤ lt. Herstellerangaben	lt. Herstellerangaben

<b>WAS</b>	<b>WANN</b>	<b>WIE</b>	<b>WOMIT</b>
Einklassifizierung	Vor der Dampfsterilisation	Schutzhandschuhe tragen! ➤ lt. Risikoeinstufungstabelle ➤ semikritisch unverpackt ➤ kritisch verpackt	- geeignete Einschweißfolie - geeignetes Einschweißgerät
Kennzeichnung	vor der Dampfsterilisation	➤ Chargennummer ➤ Verfallsdatum/Sterilisations-datum ➤ Name oder Personalnummer	Aufkleber etc.
Dampfsterilisation	Nach der Dokumentation	➤ Beladung des Dampfsterilisators nach Herstellerangaben (evtl. Helixtest)	- geeigneter Dampfsterilisator (EN 13060)

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Kontrolle und Freigabe	Nach der Dampfsterilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kontrolle auf Feuchtigkeit, Unversehrtheit der Verpackung</li> <li>➤ Kontrolle Helixtest</li> <li>➤ Prozessparameter</li> <li>➤ Thermoindikator</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> hygienische Händedesinfektion und Handschuhe sind dringend erforderlich!!</p>	- geeignete, perforationsgeschützte Handschuhe
Lagerung	Nach der Kontrolle und Freigabe	Staubgeschütz und UV – beständig in Schrank oder Schublade	

**Unterweisung durch:**

**zur Kenntnis genommen:**

---

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

---

Datum/Unterschrift (Personal)