

Standardisierte Arbeitsanweisung

Manuelle Instrumentenreinigung- im Tauchbadverfahren und thermische Desinfektion im RDG

Hinweis: Nicht Hand- und Winkelstücke und Turbinen



WAS	WANN	WIE	WOMIT
Instrumentenwanne Reinigung Die Wanne ist zu kennzeichnen mit: Produktname, Konzentration, Volumen in Liter, Ansatzdatum	Vor dem erneuten Ansetzen der Instrumentenreinigungslösung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wanne entleeren ➤ Wanne mit Wasser ausspülen ➤ ggf. mit geeigneter Bürste reinigen ➤ mit Desinfektionstuch Wanne vollständig abwischen. 	- Kunststoffbürste (Sterilisierbar) - MinutenWipes (2 Min.) - MaxiWipes mit MinutenSpray-classic getränkt (2 Min.)
Instrumenten-Reinigungslösung AlproZyme	Arbeitstäglich	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! <ul style="list-style-type: none"> - 1 Beutel AlproZyme - 2 Ltr. 20-40°C warmes geeignetes Wasser (z. B. Trinkwasser) - Granulat dazugeben und mischen - Wanne abdecken 	- geeignete Reinigungswanne - warmem geeignetem Wasser (z. B. Trinkwasser) - AlproZyme

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Beladung des RDG	Nach der Reinigung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! ➤ nach Herstellerangabe	nach Herstellerangabe
ACHTUNG : Desinfektion nur bei validiertem Thermodesinfektor möglich			
Desinfektion	Nach der Beladung	➤ starten des RDG nach Herstellerangaben	
Kontrolle	Nach der Desinfektion im RDG	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! ➤ Prüfung auf Sauberkeit und Funktion ggf. Instandsetzung ➤ wenn Mängel vorhanden ab dem Punkt „Reinigung“ nochmals beginnen	
Trocknen	Nach der Kontrolle	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! ➤ Trocknung mit Druckluft oder flusenfreien Einmalhandtüchern	- Druckluft WL-Blow oder flusenfreien Einmalhandtüchern
Dokumentation	Nach Trocknung	Lt. Herstellerangaben	Lt. Hersteller (ggf. Chargenkontrollbuch, Netzwerkeinbindung)

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Pflege	Vor der Dampfsterilisation	Schutzhandschuhe tragen! ➤ lt. Herstellerangaben	lt. Herstellerangaben
Einklassifizierung	Vor der Dampfsterilisation	Schutzhandschuhe tragen! ➤ lt. Risikoeinstufungstabelle ➤ semikritisch unverpackt ➤ kritisch verpackt	- geeignete Einschweißfolie - geeignetes Einschweißgerät
Kennzeichnung	vor der Dampfsterilisation	➤ Chargennummer ➤ Verfallsdatum/Sterilisations-datum ➤ Name oder Personalnummer	Aufkleber etc.
Dampfsterilisation	Nach der Dokumentation	➤ Beladung des Dampfsterilisators nach Herstellerangaben (evtl. Helixtest)	- geeigneter Dampfsterilisator (EN 13060)

