

Standardisierte Arbeitsanweisung

***Autarke Betriebswasserversorgung sowie Reinigung und Desinfektion von Betriebswasserwegen ärztlicher, zahnärztlicher/ oralchirurgischer Behandlungseinheiten
EN 1717 DIN 1988-100 konform***



WAS	WANN	WIE	WOMIT
Befüllen der Flaschen	Täglich und bei Bedarf	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Befüllen der Flaschen mit Leitungswasser (TVO 2011 konform) ➤ und 1 % (15 ml) Desinfektionslösung (Messkappe) 	<p>Trinkwasser (TVO 2011 konform)</p> <p>Alpron, ALPRO Medical</p>
Arretieren der vorbereiteten Druckflasche an der Flaschenaufnahme des Systems	<ul style="list-style-type: none"> ➤ bei Bedarf 	<p>Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gefüllte Druckflasche in die Flaschenaufnahme des Systems vorsichtig adaptieren ➤ Druckflasche mit Druckluft beaufschlagen ➤ nun kann mit der Behandlung begonnen werden 	<p>Druckflasche und Flaschenaufnahme</p> <p>Schalter</p>

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Wechseln der Druckflasche	Bei Entleerung der Druckflasche	<p>Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Druckflasche im druckbeaufschlagten Zustand lösen, bis die Luft hörbar entweicht. Anschließend Druckluft abschalten ➤ danach die Druckflasche entnehmen und wieder befüllen (s. o.) oder durch eine schon vorbereitete Druckflasche ersetzen 	<p>Druckflasche</p> <p>Trinkwasser (TVO Konform)</p> <p>1 % Alpron (15 ml), Alpro Medical</p>
Desinfektion der Wasserwege	Am Ende des Arbeitstages, Wochenende oder vor Urlaubsbeginn (längere Standzeiten)	<p>Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!</p> <p>Separate Druckflasche mit mind. 200 ml Bilpron befüllen und in die Flaschenaufnahme drehen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ alle wasserführenden Systeme fluten bis Bilpron sichtbar austritt ➤ Druckflasche am System belassen ➤ Einwirkzeit mind. 10 Std. max. 3 Monate 	<p>Druckflasche</p> <p>Bilpron, Alpro Medical</p> <p>Messbecher (500 ml)</p>

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Aufbereitung (Reinigung/ Desinfektion) der Druckflaschen	Bei sichtbarer Verschmutzung; spätestens wöchentlich	BC-San 100 (100 ml) komplett in die Druckflasche geben, mit Trinkwasser auffüllen und in die Flaschenaufnahme eindrehen ➤ Einwirkzeit mind. 6 Std. – anschließend Inhalt verwerfen	Druckflasche BC-San 100, Alpro Medical

Hinweis: Nach längeren Pausenzeiten (vor Arbeitsbeginn und nach Wochenenden/ Urlaub) die Wasserwege mit einer 1%igen Alpronlösung/ Trinkwasser über die Druckflasche 2 Minuten gründlich spülen.

Unterweisung durch:

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

Datum/Unterschrift (Personal)