


Standardisierte Arbeitsanweisung

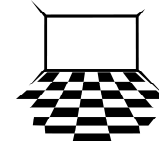

Reinigung und Desinfektion aller abwaschbaren kontaminierten Flächen

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Reinigen und Desinfizieren des 2-Kammereimers	Vor dem erneuten Ansetzen der Reinigungs- und Desinfektionslösung	Schutzhandschuhe <ul style="list-style-type: none"> ➤ Eimer entleeren ➤ Eimer mit Wasser ausspülen ➤ ggf. mit geeigneter Bürste reinigen ➤ mit Desinfektionstuch Wanne vollständig abwischen. ➤ Hinweis: vorher hyg. HD 	Kunststoffbürste MinutenWipes, PlastiSeptWipes eco MaxiWipes mit MinutenSpray- <i>classic</i> , PlastiSept eco getränkt
Reinigungs- und Desinfektionslösung im 2-Kammereimer ansetzen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ arbeitstäglich neu ansetzen ➤ wechseln bei sichtbarer Verschmutzung (z. B. Trübung, Ausflockung, Schlierenbildung) 	Schutzhandschuhe <ul style="list-style-type: none"> ➤ nur Leitungswasser in die 1. Kammer einfüllen ➤ handwarmes Leitungswasser für die Lösung abmessen und in die 2. Kammer füllen ➤ Konzentrat in die 2. Kammer einfüllen ➤ gut mischen 	Geeigneter Eimer Reinigungs- und Desinfektionslösung <ol style="list-style-type: none"> 1. Handwarmes Leitungswasser 2. DesNet + 0,5 - 5 % je nach Einsatzgebiet <p>siehe Hinweis Seite 2</p>

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Reinigung und Desinfektion aller kontaminierten Flächen in der Praxis Behandlungszimmer, Aufbereitungsraum, Labor etc.	Nach Behandlungsende arbeitstäglich und bei sichtbarer Kontamination	Schutzhandschuhe ➤ MaxiWipes reel Tuch mit Lösung aus der 2. Kammer tränken und die Flächen reinigen und desinfizieren ➤ MaxiWipes reel Tuch immer erst in der 1. Kammer auswringen bevor die Anwendung erneut durchgeführt wird ➤ Flächen gleichmäßig benetzen und gemäß Angaben (s. u.) einwirken lassen ➤ Entsorgung des MaxiWipes reel Tuches	2-Kammereimer ALPRO MaxiWipes reel Tuch Leitungswasser DesNet +

Wichtiger Hinweis:

**Für allgemeine Hygiene bei 0,5%-iger Verdünnung:
5 Liter Konzentrat ergeben 1000 Liter gebrauchsfertige Lösung
0,5 % - 60 Min.
2,0 % - 15 Min.**

**Bei hoher Infektionsgefahr max. Wirksamkeit:
4% - 60 Min. oder
5% - 15 Min. (z. B. kritische Bereiche wie OP-Säle)**

Unterweisung durch:

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

Datum/Unterschrift (Personal)