

# Standardisierte Arbeitsanweisung

## Reinigung und Desinfektion von kontaminierten Flächen nach der Behandlung



WAS	WANN	WIE	WOMIT
Dentaleinheit und kontaminierte Flächen im Behandlungszimmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nach jedem Patienten</li> <li>➤ vor Arbeitsbeginn</li> <li>➤ bei sichtbarer Kontamination</li> </ul>	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ von minder kontaminiert zu hoch kontaminiert</li> <li>➤ Lampe, Arztelement ohne Übertragungsinstrumente, Patientenstuhl, Helferinnenelement, Saugschläuche, Speischale</li> <li>➤ Behandlungszeile, Griffe, externe Geräte (Röntgen-, prophylaxe Geräte etc.)</li> </ul>	<p>MinutenWipes Jumbo (2 Min.)</p> <p>PlastiSept-Wipes <i>eco</i> (5 Min.)</p> <p>MaxiWipes reel* mit MinutenSpray-<i>classic</i> (2 Min.) oder PlastiSept <i>eco</i> getränkt (5 Min.)</p> <p>MaxiWipes wet (5 Min.)</p> <p>CidWipes <i>eco</i> (2 Min.)</p>

\* Ansetzen der trockenen Tücher mit 2,5 Ltr. MinutenSpray-*classic* oder 1,6 Ltr. PlastiSept *eco*  
Chargendokumentation- Reinigung und Desinfektion der Behälter mit BC-San 100 Lösung lt. SAA für BC-San 100

**Hinweis:**

Es empfiehlt sich bei einem Wechsel der Flächendesinfektionsprodukte vor der Verwendung eines neuen Präparates alle zu desinfizierenden Oberflächen gründlich mit einem neutralen Reinigungsmittel (Wasser und Reinigungsmittel) zu reinigen und mit klarem Wasser nach zu wischen, um mögliche Reaktionen von Remanenzwirkstoffen der Flächendesinfektionsmittel zu vermeiden!

**Unterweisung durch:**

---

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

**zur Kenntnis genommen:**

---

Datum/Unterschrift (Personal)