

Standardisierte Arbeitsanweisung

Reinigung und umfassende Desinfektion von nicht thermisch aufbereitbaren Medizinprodukten semikritisch A

(z. Bsp. Lichtleiter, Polymerisationsleiter und Optiken von Intraoralkameras)

WAS	WANN	WIE	WOMIT
<p>Reinigung und Desinfektion von nicht thermisch aufbereitbaren Medizinprodukten</p> <p>(z. Bsp. Polymerisationslampen und Intraoralkameras)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ nach jedem Patienten ➤ vor Arbeitsbeginn 	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reinigung: kontaminierte Fläche von minder kontaminiert zu hoch kontaminiert gründlich abwischen ➤ Desinfektion: gereinigte Fläche mit einem fuselfreien, getränkten Tuch gründlich desinfizieren ➤ Empfehlung: Arbeitstäglich vorzugsweise abends mit Leitungswasser reinigen (neutralisieren) 	<p>1. Reinigung/ Desinfektion mit Cleanwipes/ PlastiSept eco/ MinutenWipes Jumbo 50, Alpro-Medical GmbH</p> <p>2. Umfassende Abschlußdesinfektion mit BC-San 100 gebrauchsfertig 1 - 2 % Aktivchlor, Natriumhypochlorid</p> <p>Einwirkzeit 5 Minuten</p> <p>TVO konformes Leitungswasser</p>

Unterweisung durch:

zur Kenntnis genommen:

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

Datum/Unterschrift (Personal)